



Regal

Installation instruction

20106
20204
20212

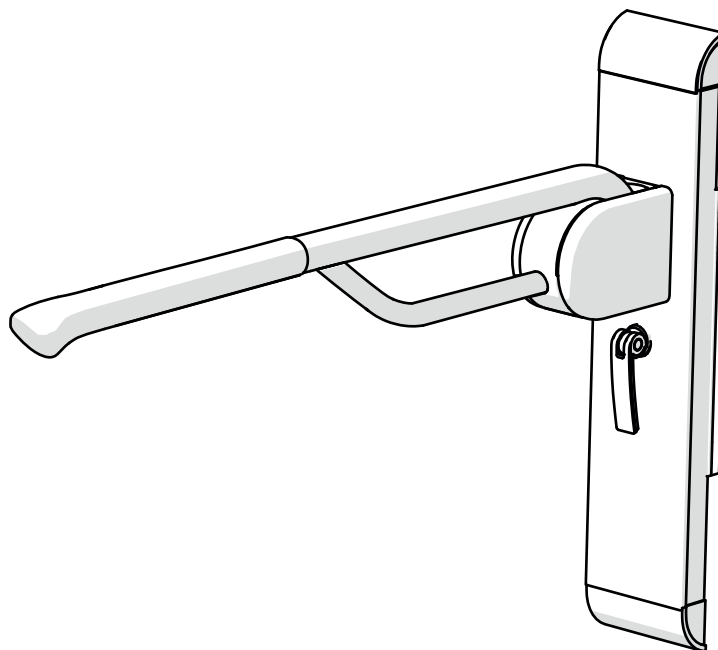

20106
20204
20212

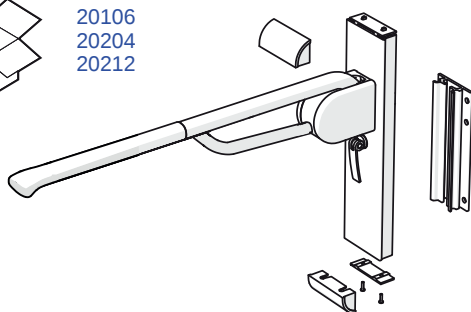

6208



x6



x6



x6





x6

8x60 mm





> [korpinen.com](https://www.korpinen.com)



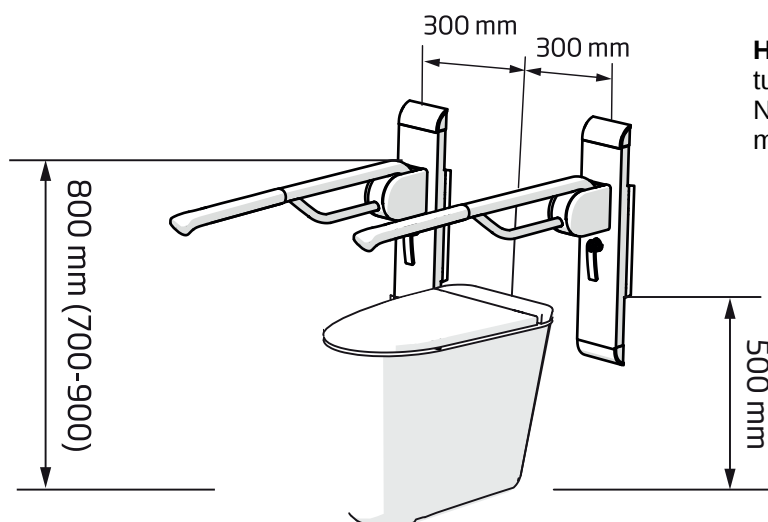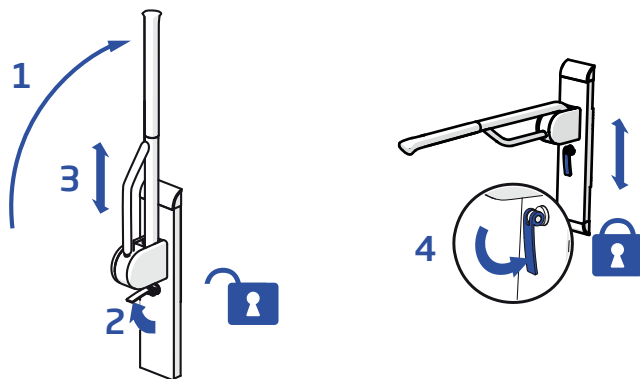


Huomioi paikalliset ohjeet mm. tukikaiteiden välisestä etäisyydestä. Ne saattavat poiketa tämän ohjeen mitoista.



A

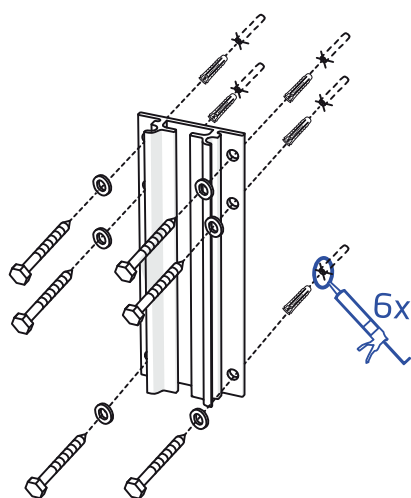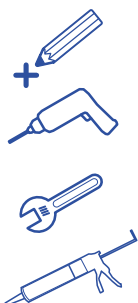


B

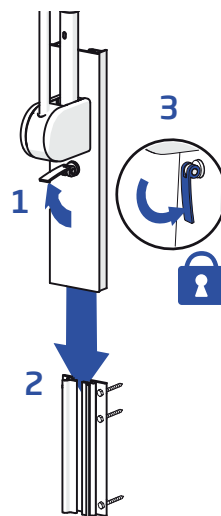

C

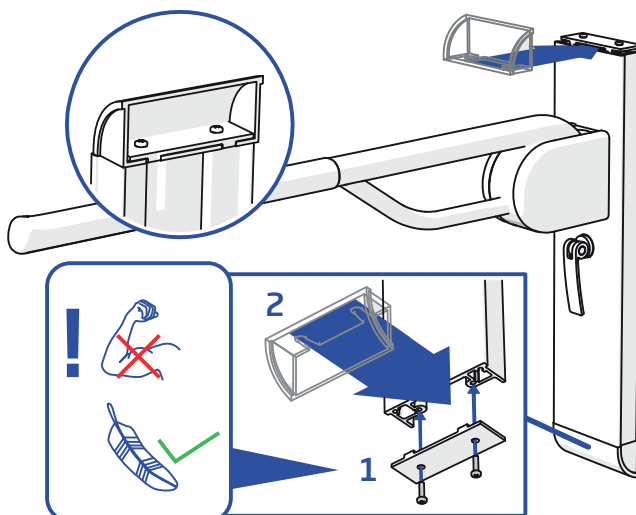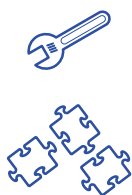

Asennusrajapinnat: Korkeussäädettävä Regal- tukikaide sisäänrakennetulla Oras-Bidetta -käsisuihkun liitäntäkaapelilla

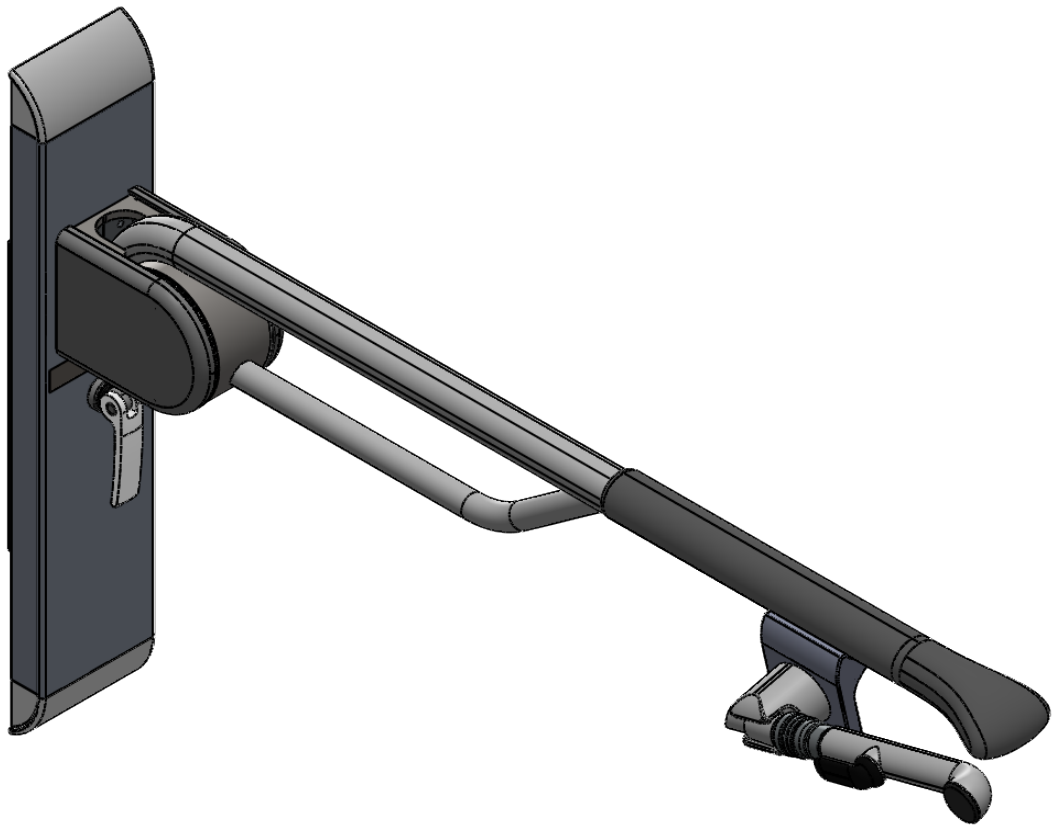

Asentamisen erityisohjeita




Vesijohtoja ja muita putkia tai sähkökaapeleita ei tule asentaa kuvassa **punaisella** merkitylle alueelle, alle 100 mm syvyydelle seinän pinnasta.

Asentamisessa noudatetaan muilta osin Regal-tukikaiteen asennusohjetta.


Liitäntäkaapelin asennuspaikka. Kaapeli kiinnitetään seinään nippusideankkurilla.

Liitäntäkaapeli voidaan asentaa joko kaiteen oikealle tai vasemmalle puolelle.

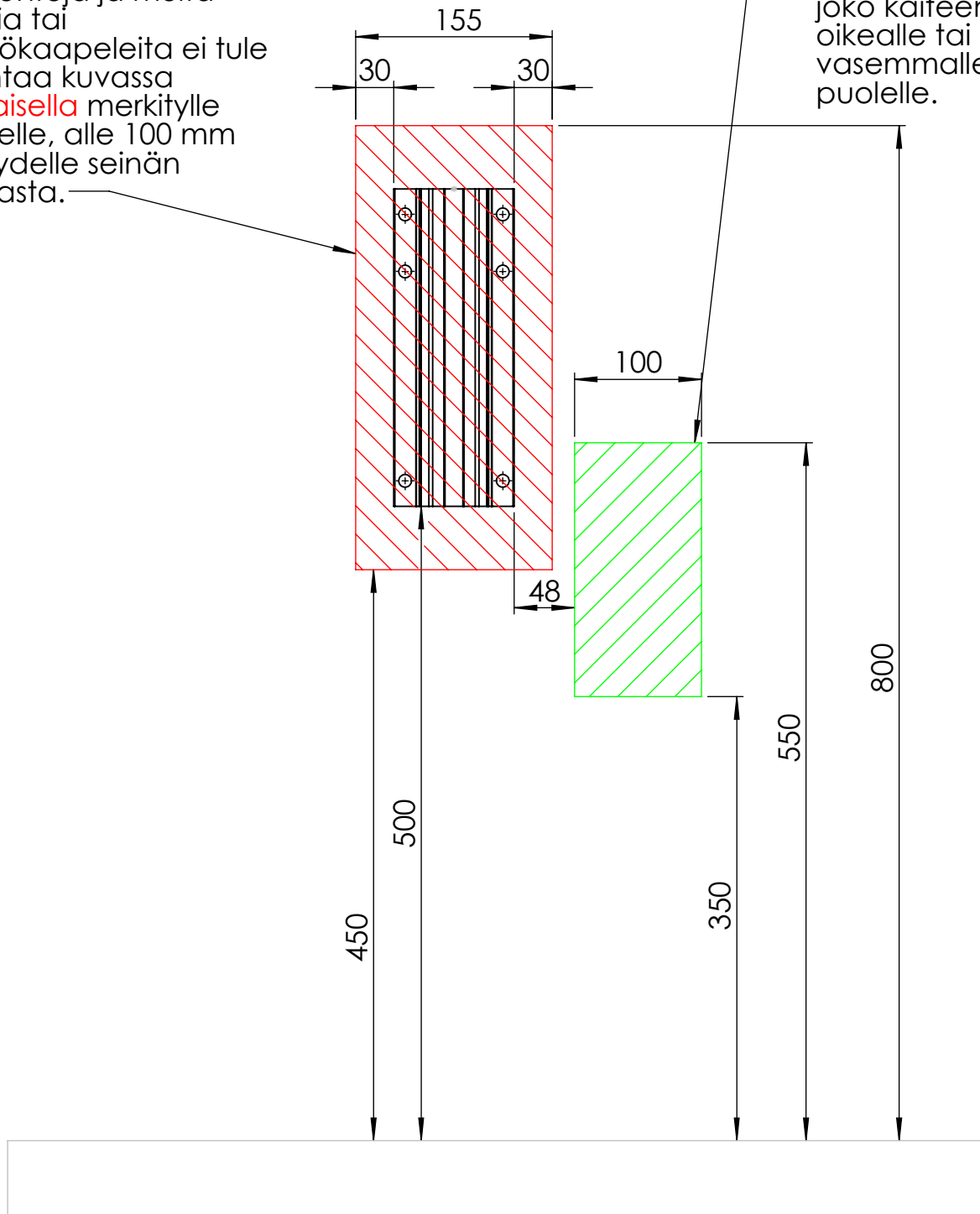


Asentamisen erityisohjeita

Asentamisessa noudatetaan muilta osin Regal-tukikaiteen asennusohjetta.

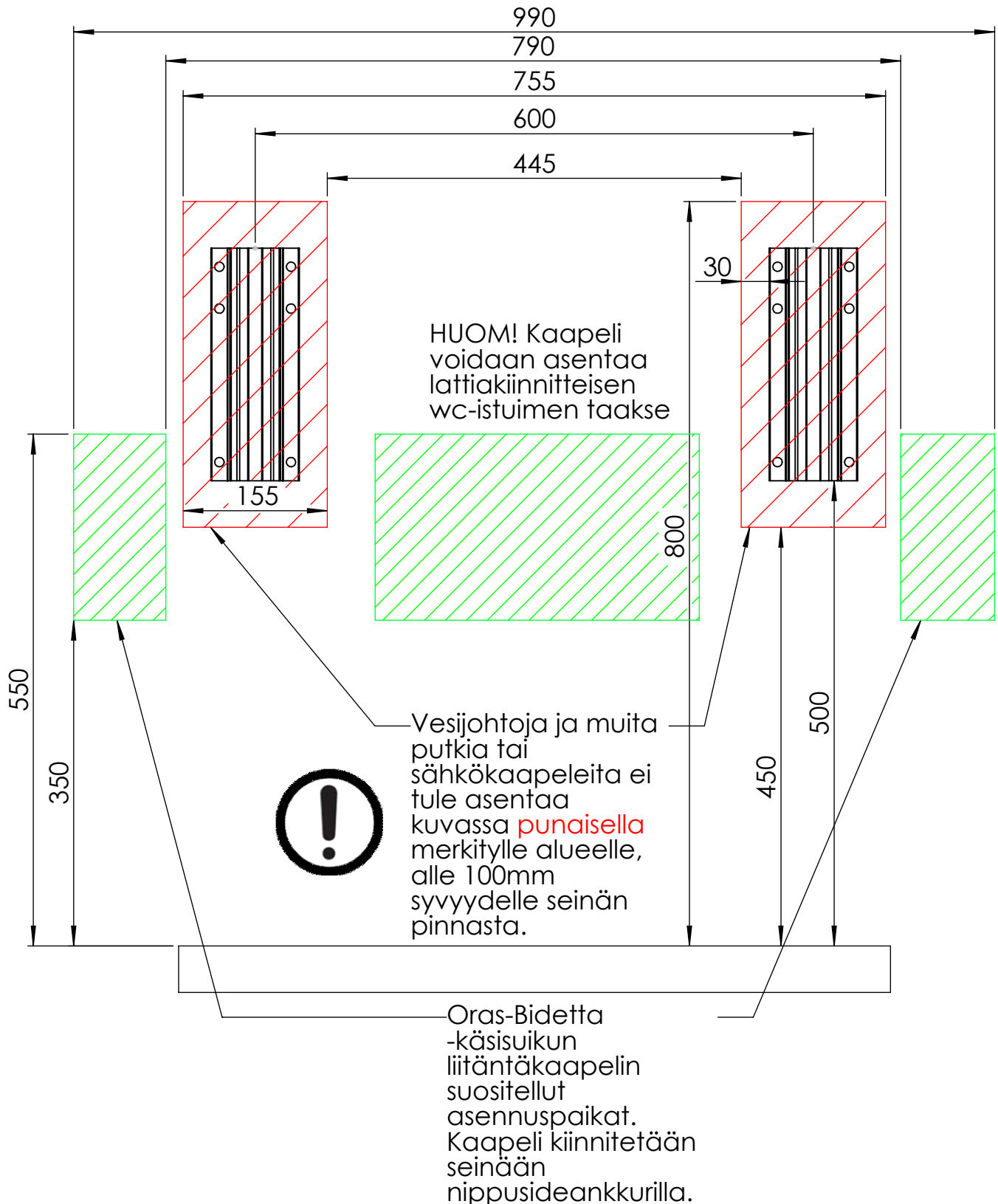


Kaapeli kiinnitetään nippusideankkurin avulla **punaisella** merkitylle alueelle tukikaiteen sivuun.


Kaapeli kaiteen vasemmalla puolella:

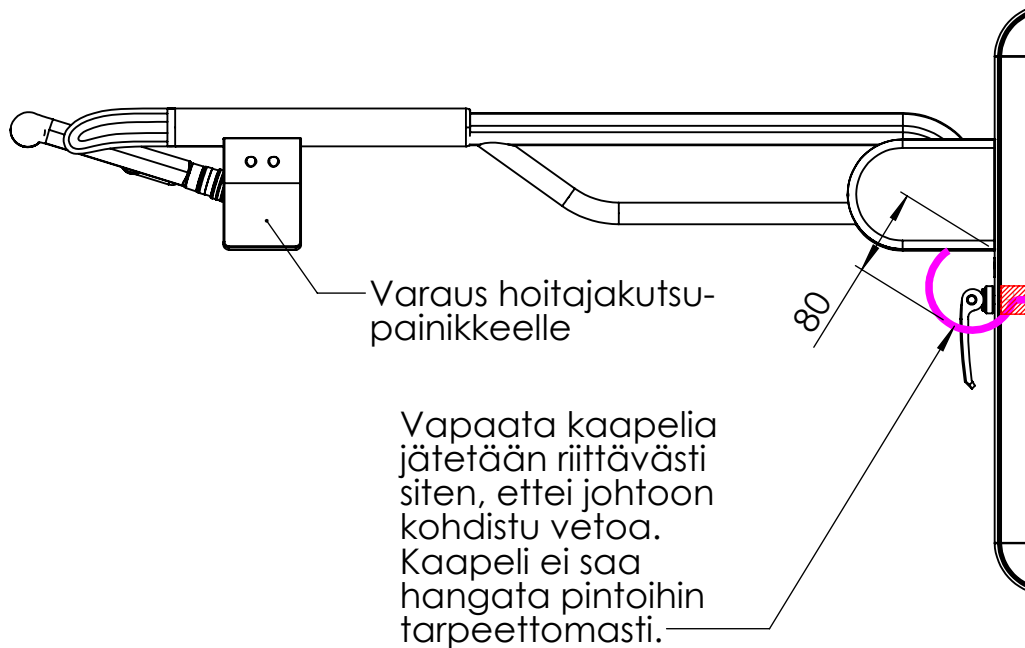

Kaapeli kaiteen oikealla puolella:

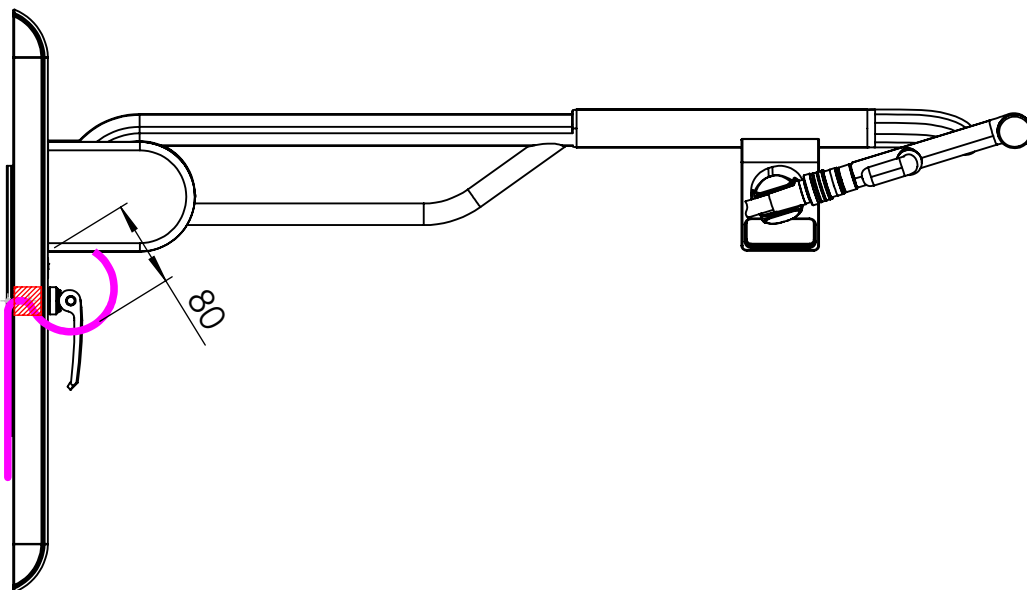

Liitäntäkaapeli voidaan asentaa joko kaiteen oikealle tai vasemmalle puolelle.

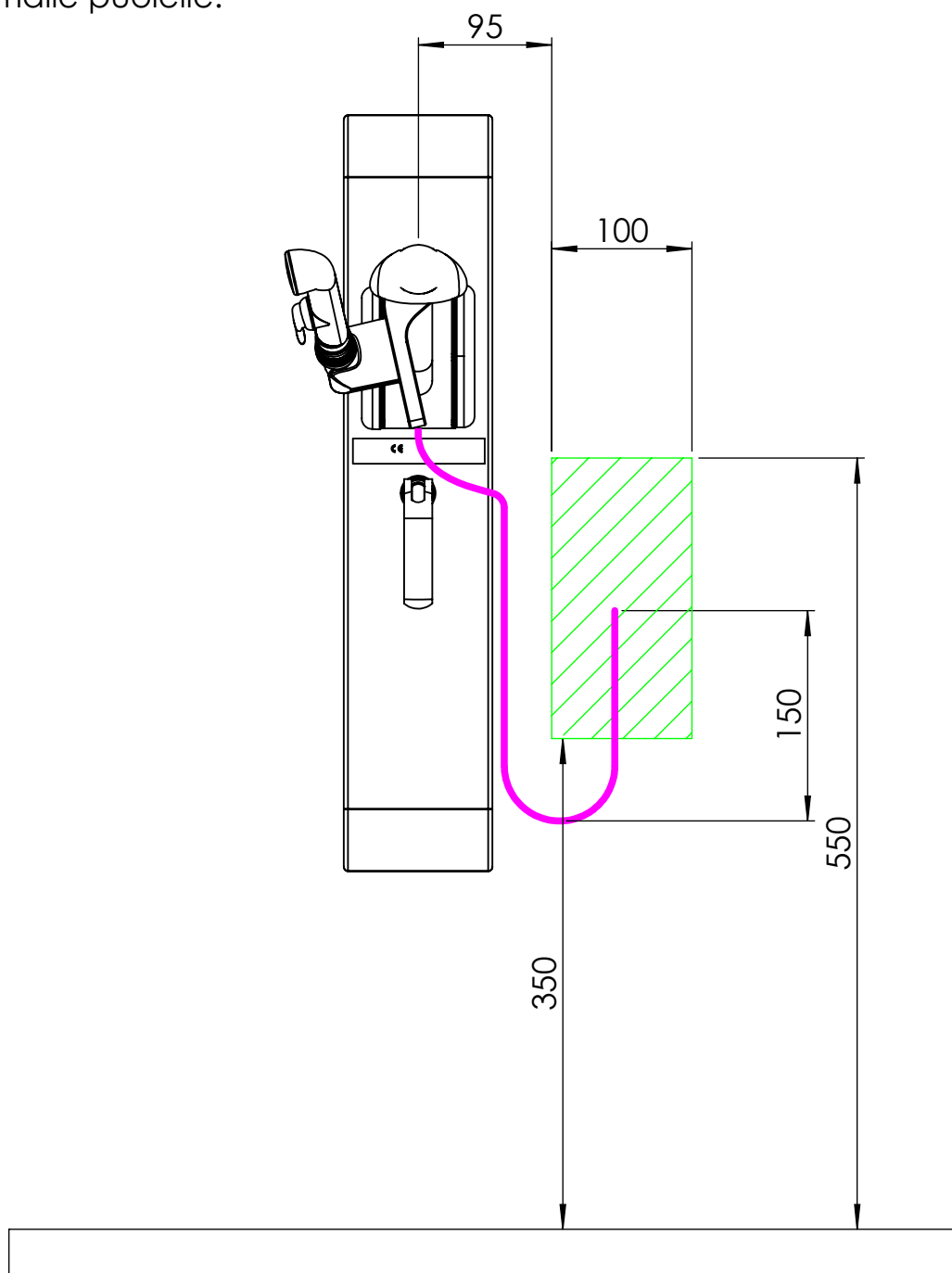

HUOM! Kuvassa kaide korkeussäädön alimmassa asennossa.


Asennusohjeen liite

Tuotenumeroiltaan O197-loppuiset
korkeussäädettävät Regal-tukikaiteet
sisäänrakennetulla Oras-Bidetta
-liitäntäkaapelilla

20106G-O197
20106R-O197

20204G-O197
20204R-O197


20212G-O197
20212R-O197

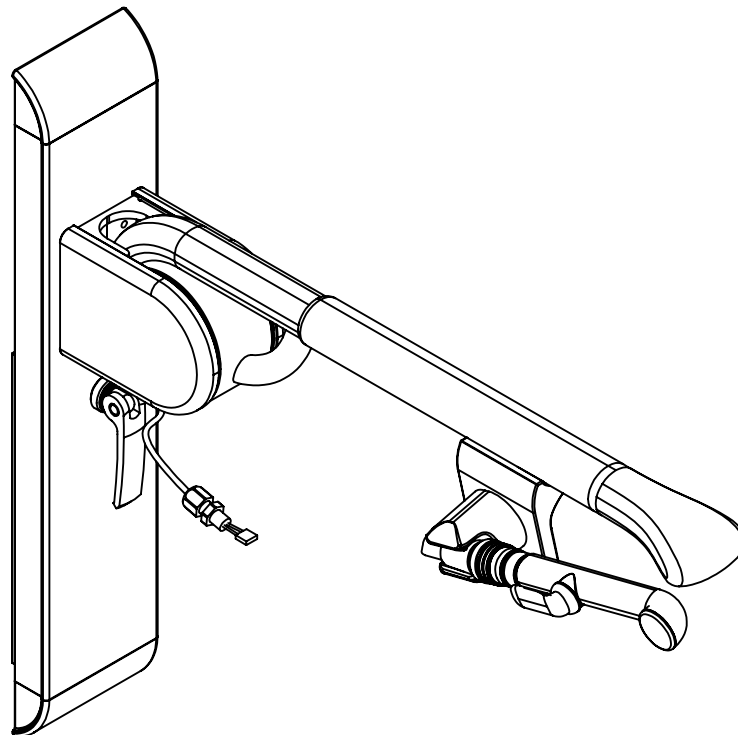

Huom! Tämän ohjeen kaapelit ei mittakaavassa!


Tässä ohjeessa näytetään oikeakätinen asennustapa. Vasenkätinen asennus tapahtuu kääntämällä kannake 17726 vastakkaiselle puolelle.

A

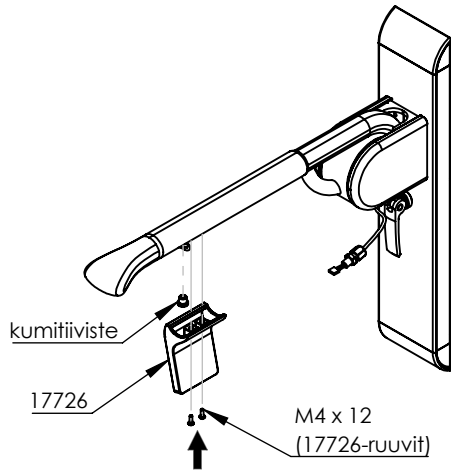


Varmista, että tukikaiteen kaapelin kumitiiviste on asennettu paikoilleen. Pujota tukikaiteen sisältä tuleva kaapeli kannakkeen läpi. Ruuvaa kannake (17726) kiinni tukikaiteeseen käyttäen mukana tulevia M4 x 12 uraruuveja.

B

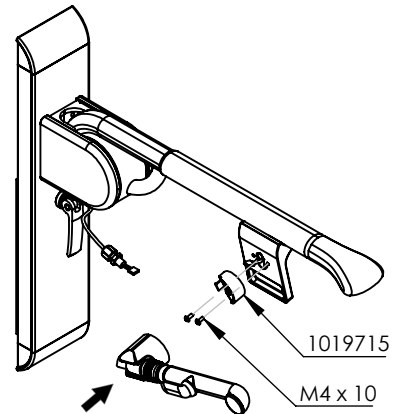

Pujota kaapeli Oras-seinäkanakkeen (1019715) läpi, ruuvaa Oras-seinäkanake kiinni tukikaiteen kannakkeeseen (17726) käyttäen mukana tulevia M4 x 10 ruuveja. Asenna kaapeli Oraksen ohjeiden mukaisesti käsisuihkun ripustimeen.

C

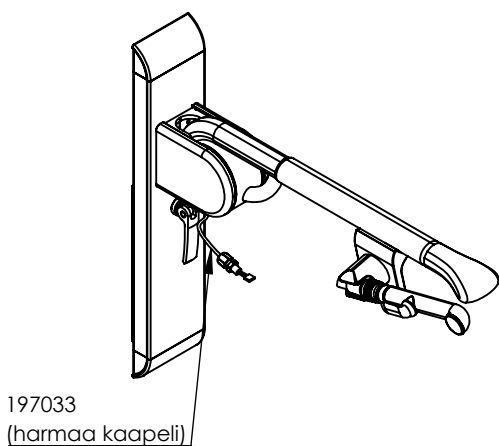

Kaapeli (197033) kytketään Oraksen etä-Bidetta-järjestelmään Oraksen ohjeiden mukaisesti.

Nro.	Tuotenumero	Nimi	Toimittaja	Muu huomio
1	20106G-O197 20106R-O197 20204G-O197 20204R-O197 20212G-O197 20212R-O197	Korkeussäädettävä Korpinen Regal-tukikaide sisäänrakennetulla Oras Bidetta-liitäntäkaapelilla (197033)	KORPINEN	WC-istuimen toiselle puolelle vastaava tukikaide ilman kaapelia, poista "-O197" tuotenumeroista
2	6208	Kiinnitystarvikkeet (tiili/harkko/betoni)	KORPINEN	Tilattavissa erikseen Korpiselta
3	17726	Kannake Oras-käsisuihkun ripustimelle Regal- tukikaiteeseen	KORPINEN	Toimitetaan liitäntäkaapelilla varustetun Regal- tukikaiteen mukana
4	17726-ruuvit	Ruuvit 17726 kannakkeen ja Regal-tukikaiteen väliseen kiinnitykseen	KORPINEN	Toimitetaan liitäntäkaapelilla varustetun Regal- tukikaiteen mukana
5	Oras 6105Z, 6205Z, 6205MZ, 197065Z tai 197065MZ	Oras Electra- pesuallashanapaketti käsisuihkulla	ORAS	Lisätiedot ja tilaus Oras- jälleenmyyjältä
6	1019715	Oras seinäkannake (sis. ruuvit)	ORAS	Lisätiedot ja tilaus Oras- jälleenmyyjältä