



Regal

Installation instruction

20106
20204
20212

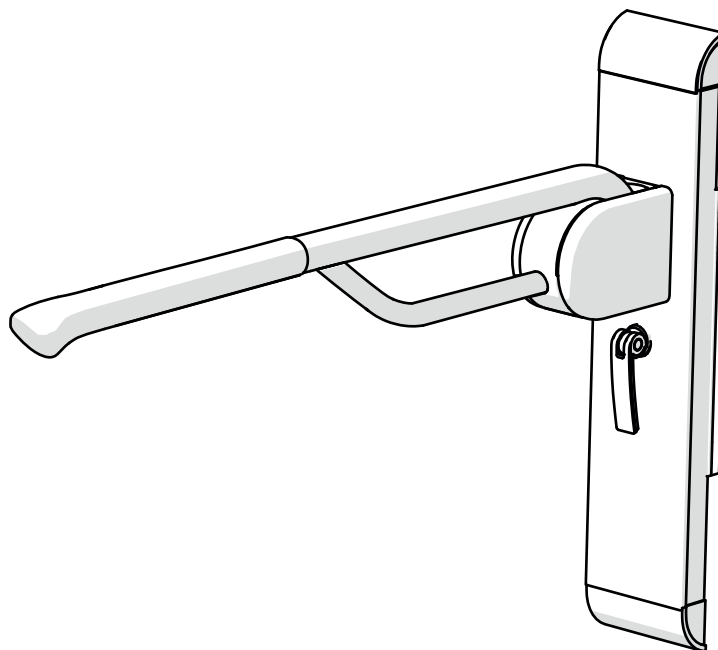

20106
20204
20212

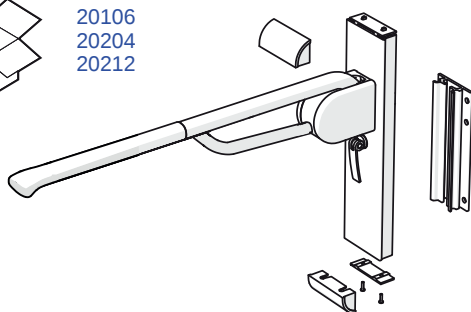

6208



x6



x6



x6





x6

8x60 mm





> korpinen.com



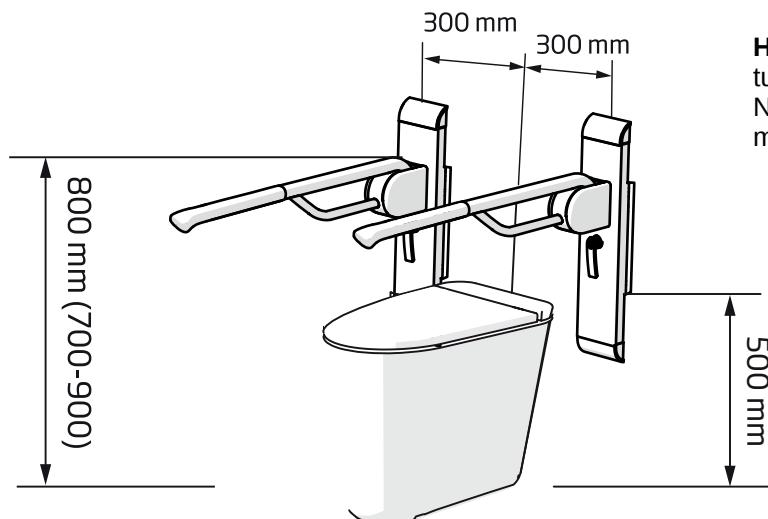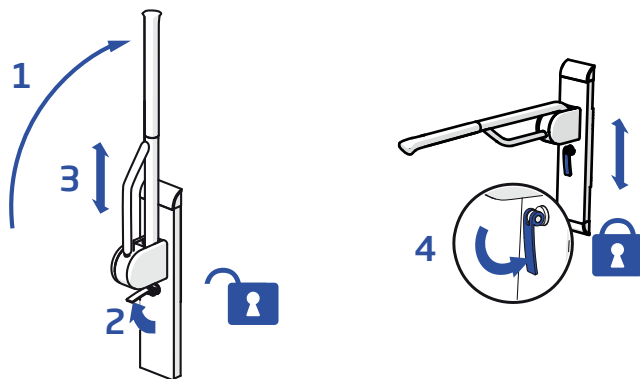


Huomioi paikalliset ohjeet mm. tukikaiteiden välisestä etäisyydestä. Ne saattavat poiketa tämän ohjeen mitoista.



A

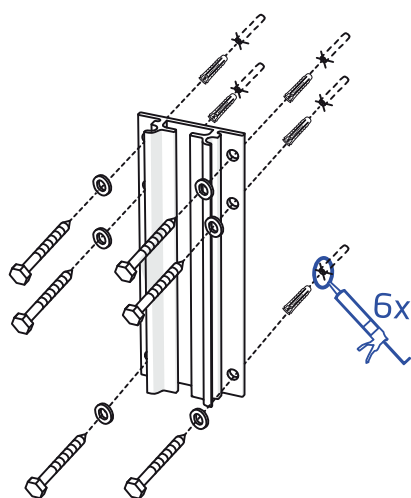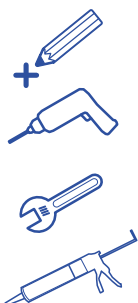


B

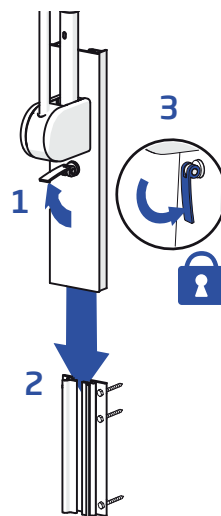

C

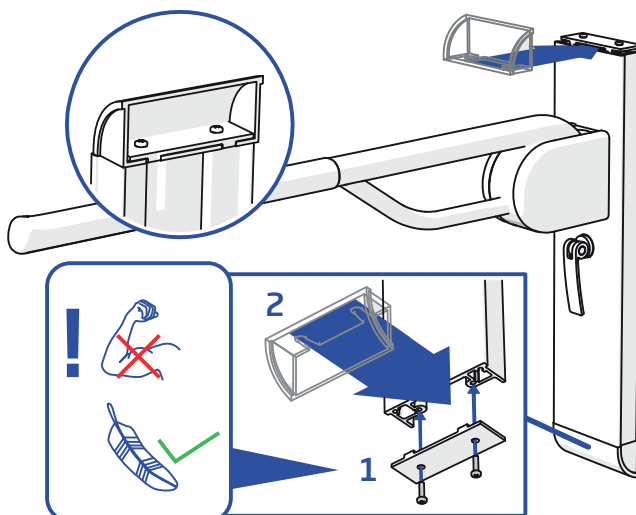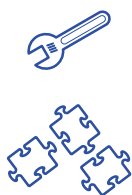

Asennusrajapinnat: Korkeussäädettävä Regal- tukikaide sisäänrakennetulla Oras-Bidetta -käsisuihkun liitäntäkaapelilla

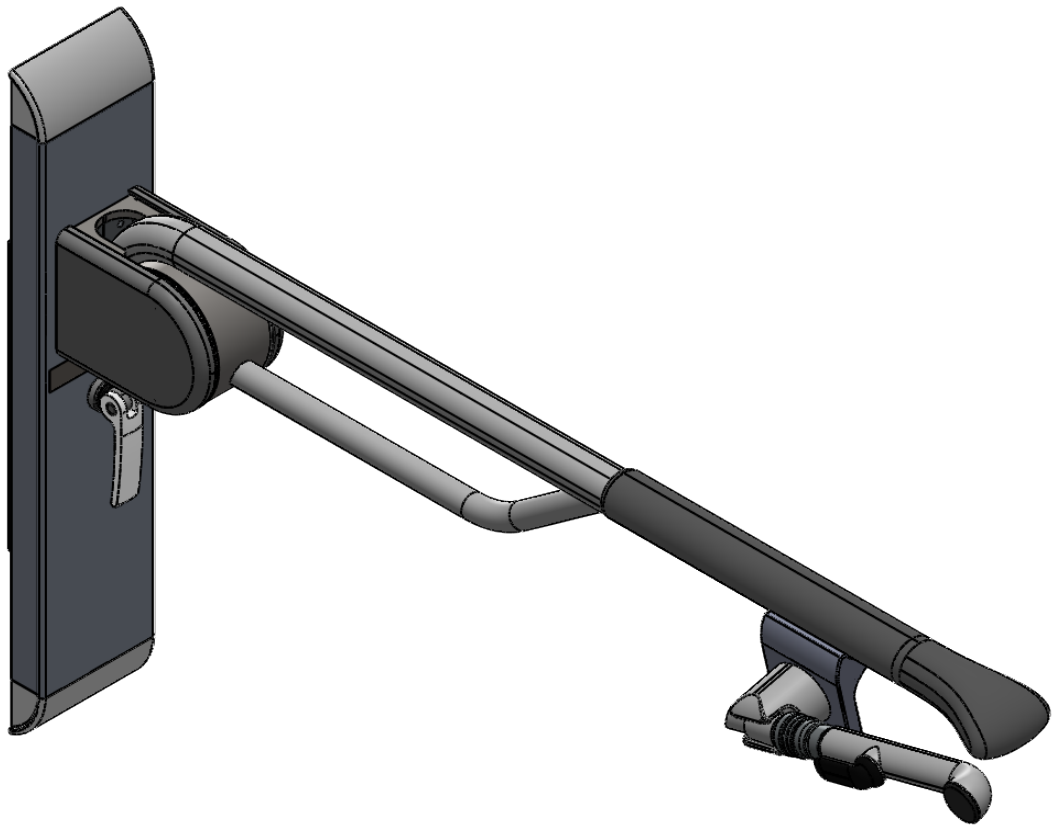

Asentamisen erityisohjeita




Vesijohtoja ja muita putkia tai sähkökaapeleita ei tule asentaa kuvassa **punaisella** merkitylle alueelle, alle 100 mm syvyydelle seinän pinnasta.

Asentamisessa noudatetaan muilta osin Regal-tukikaiteen asennusohjetta.


Liitäntäkaapelin asennuspaikka. Kaapeli kiinnitetään seinään nippusideankkurilla.

Liitäntäkaapeli voidaan asentaa joko kaiteen oikealle tai vasemmalle puolelle.

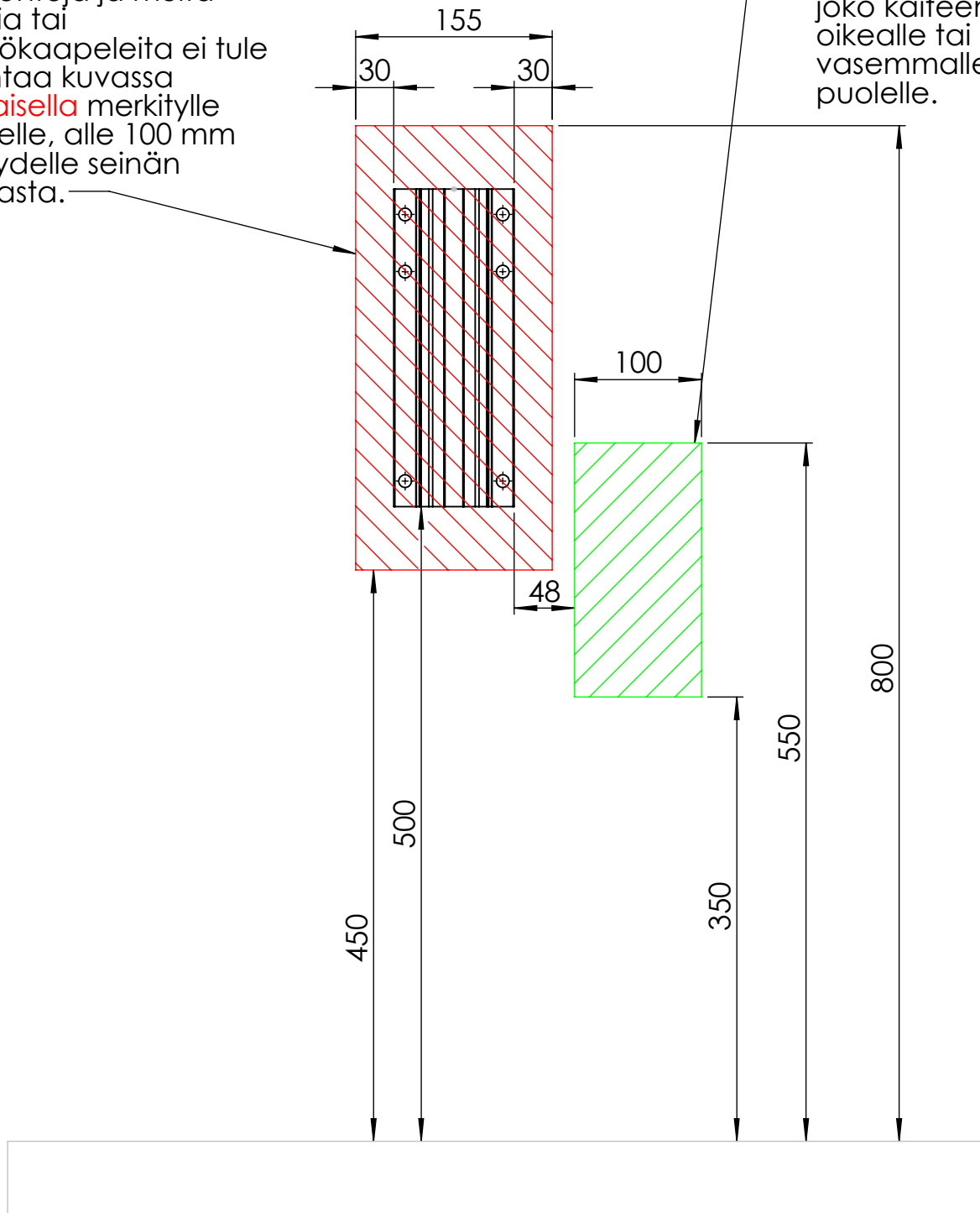


Asentamisen erityisohjeita

Asentamisessa noudatetaan muilta osin Regal-tukikaiteen asennusohjetta.

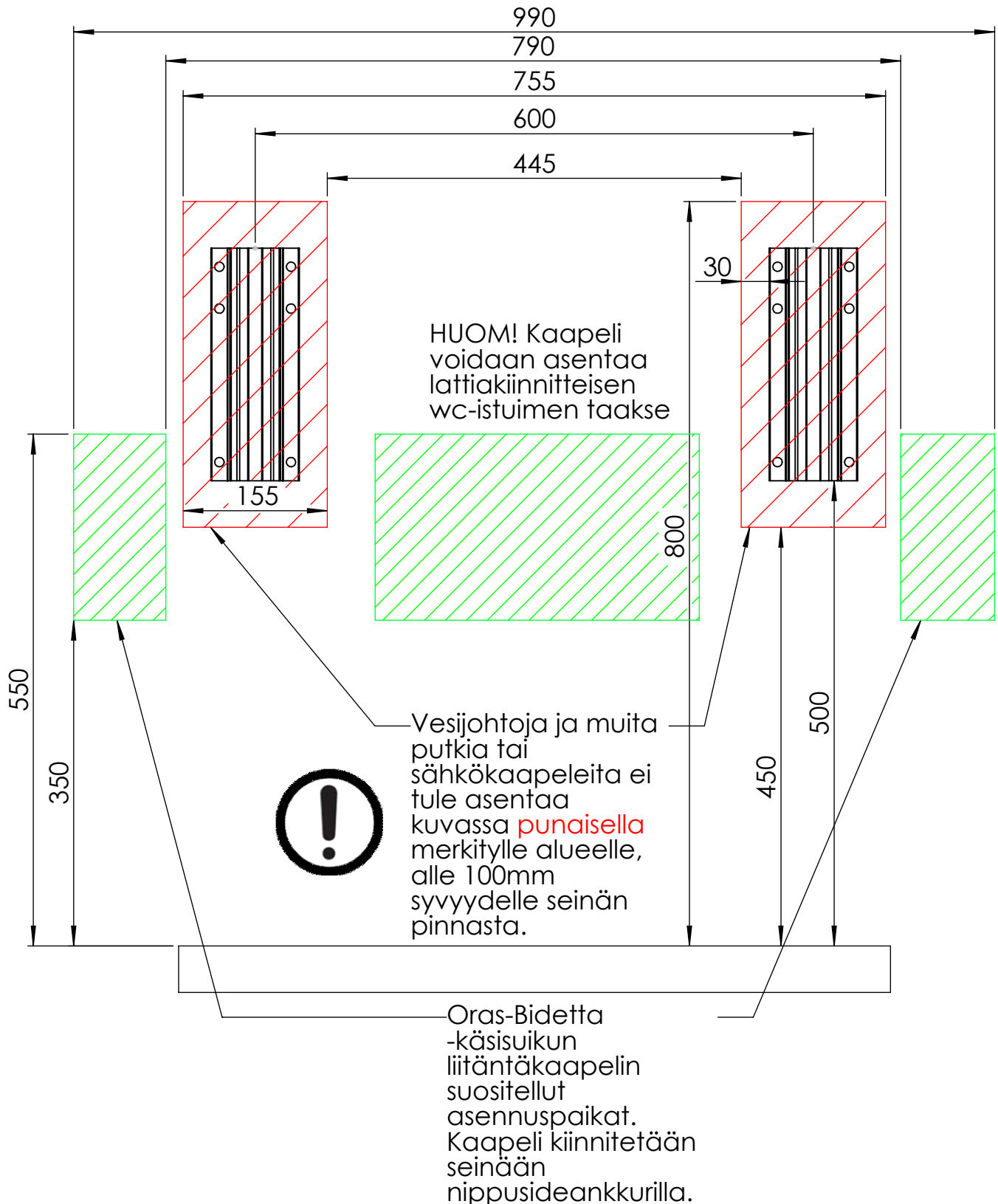


Kaapeli kiinnitetään nippusideankkurin avulla **punaisella** merkitylle alueelle tukikaiteen sivuun.


Kaapeli kaiteen vasemmalla puolella:

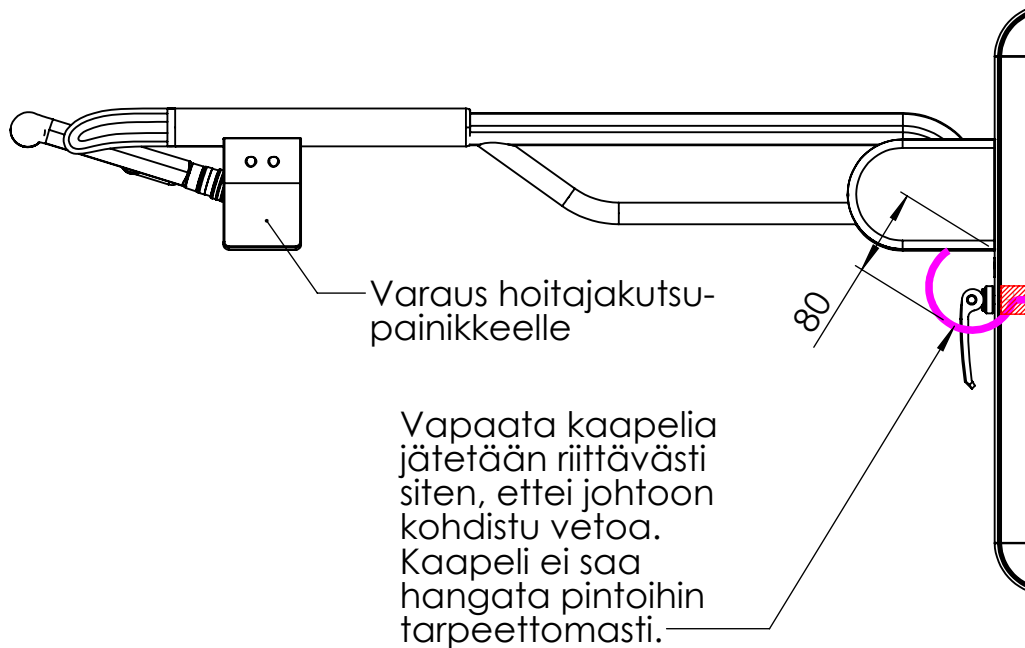

Kaapeli kaiteen oikealla puolella:

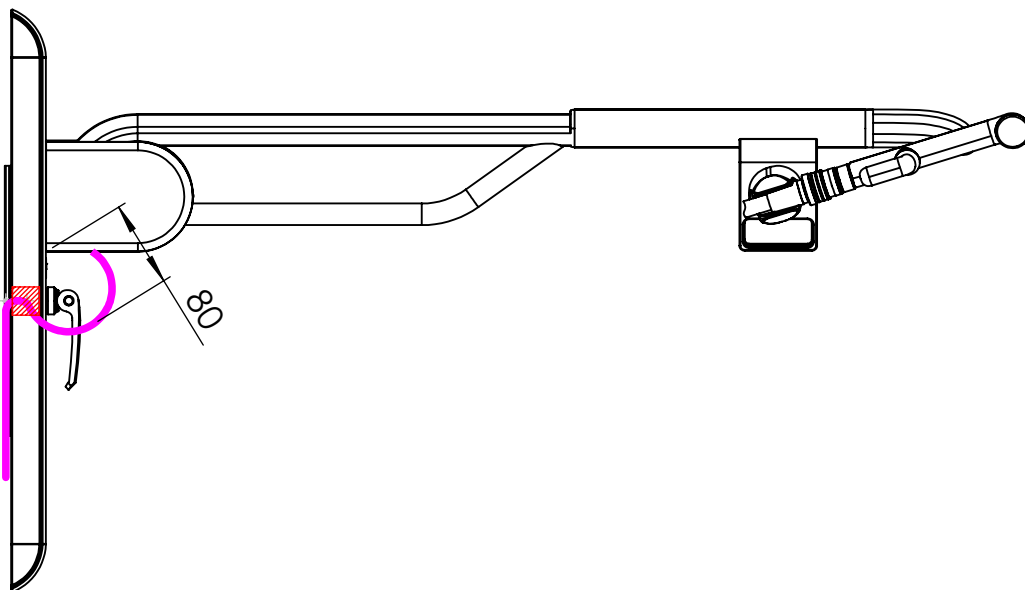

Liitäntäkaapeli voidaan asentaa joko kaiteen oikealle tai vasemmalle puolelle.

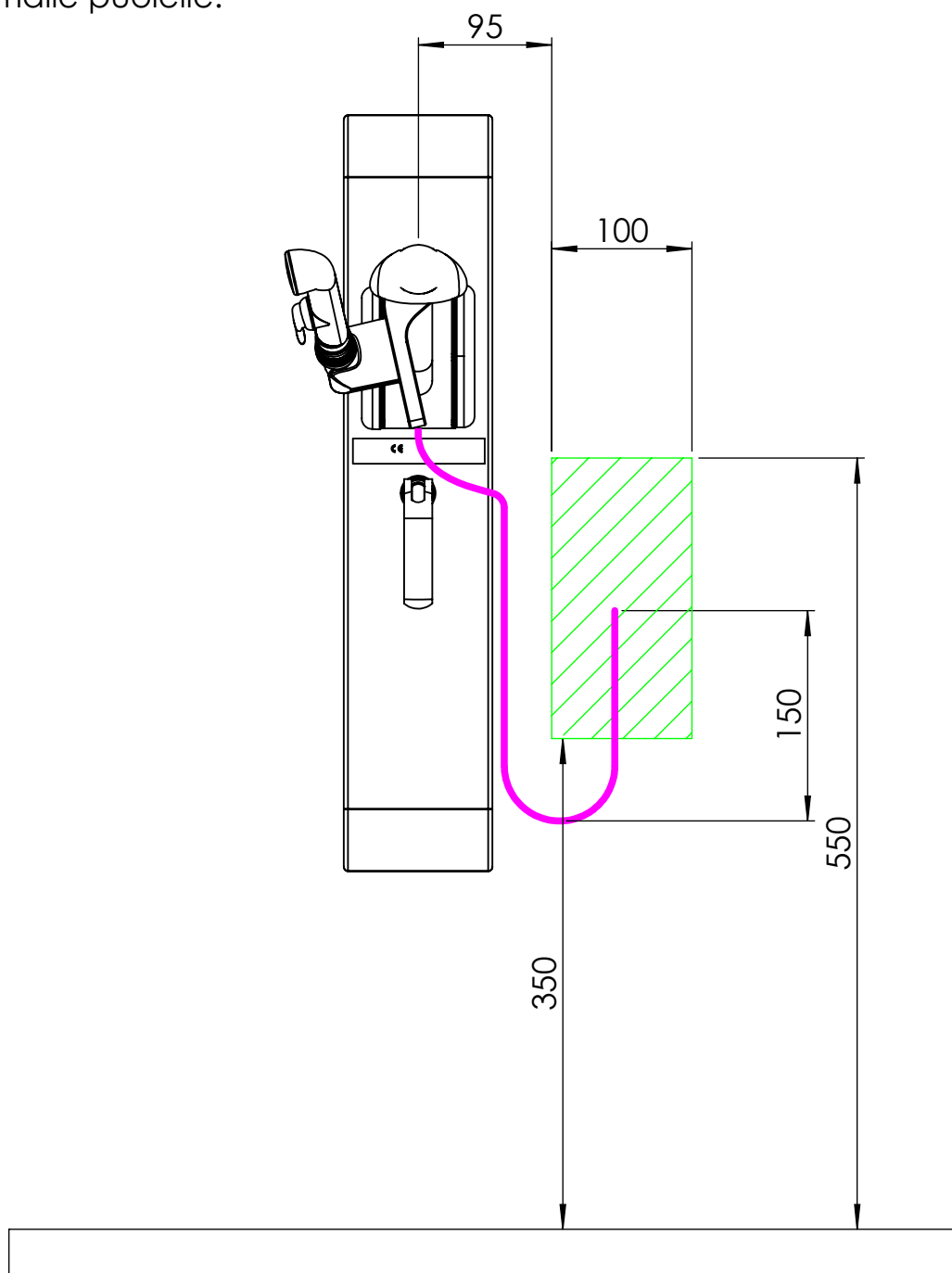

HUOM! Kuvassa kaide korkeussäädön alimmassa asennossa.


Asennusohjeen liite

Tuotenumeroiltaan O199-loppuiset
korkeussäädettävät Regal-tukikaiteet
sisäänrakennetulla Oras-Bidetta
-liitäntäkaapelilla

20106G-O199
20106R-O199

20204G-O199
20204R-O199

20212G-O199
20212R-O199

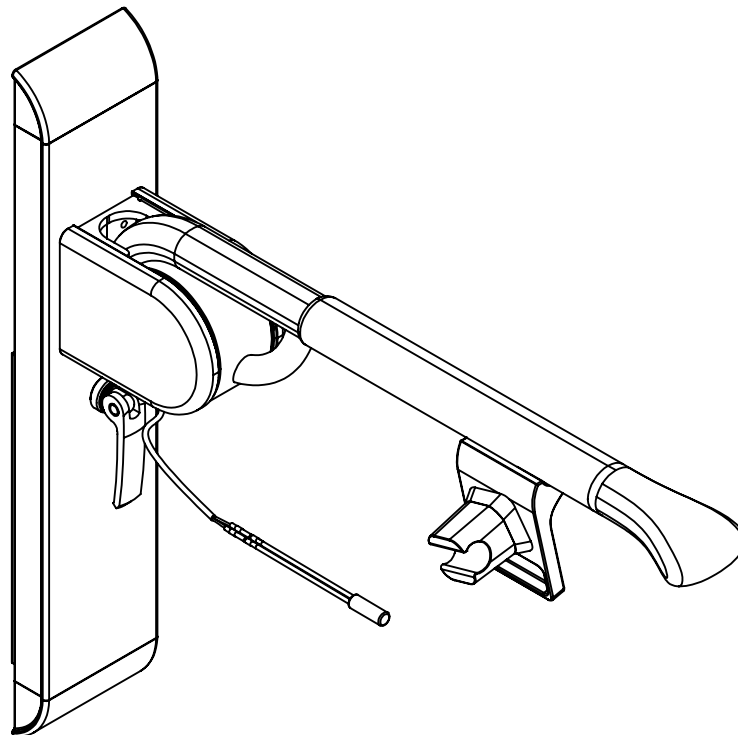


Huom! Tämän ohjeen johdot ei mittakaavassa!

Huom! Asentajalla tulee olla asianmukaiset pätevyydet.


Tässä ohjeessa näytetään oikeakätinen asennustapa. Vasenkätinen asennus tapahtuu kääntämällä kannake 17726 vastakkaiselle puolelle.

A

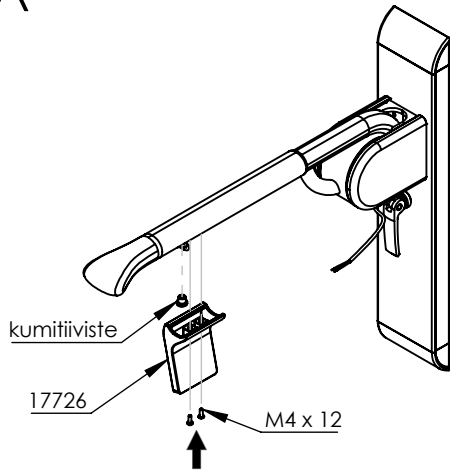

Varmista, että tukikaiteen kaapelin kumitiiviste on asennettu paikoilleen. Pujota tukikaiteen sisältä tuleva kaapeli kannakkeen läpi. Ruuvaa kannake (17726) kiinni tukikaiteeseen käyttäen mukana tulevia M4 x 12 uraruuveja.


B

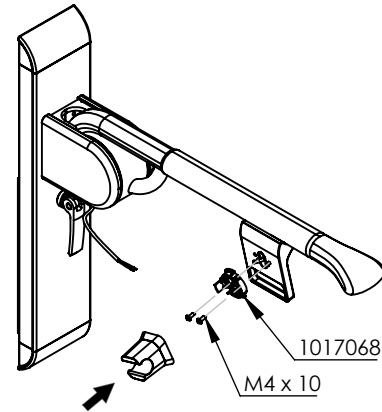

Pujota kaapeli Oras-seinäkannakkeen (1017068) läpi, ruuvaa Oras-seinäkannake kiinni tukikaiteen kannakkeeseen (17726) käyttäen mukana tulevia M4 x 10 ruuveja. Asenna kaapeli Oraksen ohjeiden mukaisesti käsisuihkun ripustimeen.

C1


ASENNUS PISTOTULPPAMUUNTAJAAN

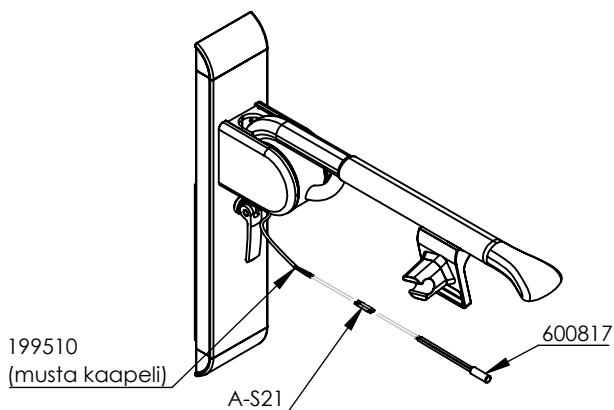

Leikkaa tukikaiteen sisältä tuleva kaapeli (199510) sopivan mittaiseksi (mikäli tarpeen). Asenna liitin (600817) paikoilleen käyttäen kutistejatkoliittimiä tinalla (A-S21) ja kuumailmapuhallinta. Kaapeli voidaan nyt liittää pistotulppamuuntajaan Oraksen ohjeiden mukaisesti.

C2

ASENNUS SUORAAN MUUNTAJAAN

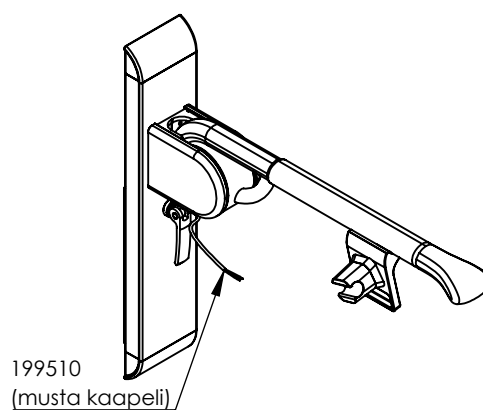

Leikkaa tukikaiteen sisältä tuleva kaapeli (199510) sopivan mittaiseksi (mikäli tarpeen). Kaapeli kytketään suoraan muuntajaan Oraksen ohjeiden mukaisesti.

Nro.	Tuotenumero	Nimi	Toimittaja	Muu huomio
1	20106G-O199 20106R-O199 20204G-O199 20204R-O199 20212G-O199 20212R-O199	Korkeussäädettävä Korpinen Regal-tukikaide sisäänrakennetulla Oras Bidetta-liitântäkaapelilla (199510)	KORPINEN	WC-istuimen toiselle puolelle vastaava tukikaide ilman kaapelia, poista "-O199" tuotenumeroista
2	6208	Kiinnitystarvikkeet (tiili/harkko/betoni)	KORPINEN	Tilattavissa erikseen Korpiselta
3	17726	Kannake Oras-käsisuihkun ripustimelle Regal-tukikaiteeseen	KORPINEN	Toimitetaan liitântäkaapelilla varustetun Regal-tukikaiteen mukana
4	17726-ruuvit	Ruuvit 17726 kannakkeen ja Regal-tukikaiteen väliseen kiinnitykseen	KORPINEN	Toimitetaan liitântäkaapelilla varustetun Regal-tukikaiteen mukana
5	1017068	Oras seinäkannake	KORPINEN	Toimitetaan liitântäkaapelilla varustetun Regal-tukikaiteen mukana
6	1017068-ruuvit	Ruuvit kannakkeiden 17726 ja 1017068 väliseen kiinnitykseen	KORPINEN	Toimitetaan liitântäkaapelilla varustetun Regal-tukikaiteen mukana
5	600817	Liitântäkaapeli pistotulppamuuntajaan	KORPINEN	Toimitetaan liitântäkaapelilla varustetun Regal-tukikaiteen mukana
6	A-S21	Kutistejatkoliitin tinalla	KORPINEN	Toimitetaan liitântäkaapelilla varustetun Regal-tukikaiteen mukana
7	Oras 197096Z, tai 197103Z	Oras Electra-pesuallashanapaketti käsisuihkulla	ORAS	Lisätiedot ja tilaus Oras-jälleenmyyjältä