


DUON KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

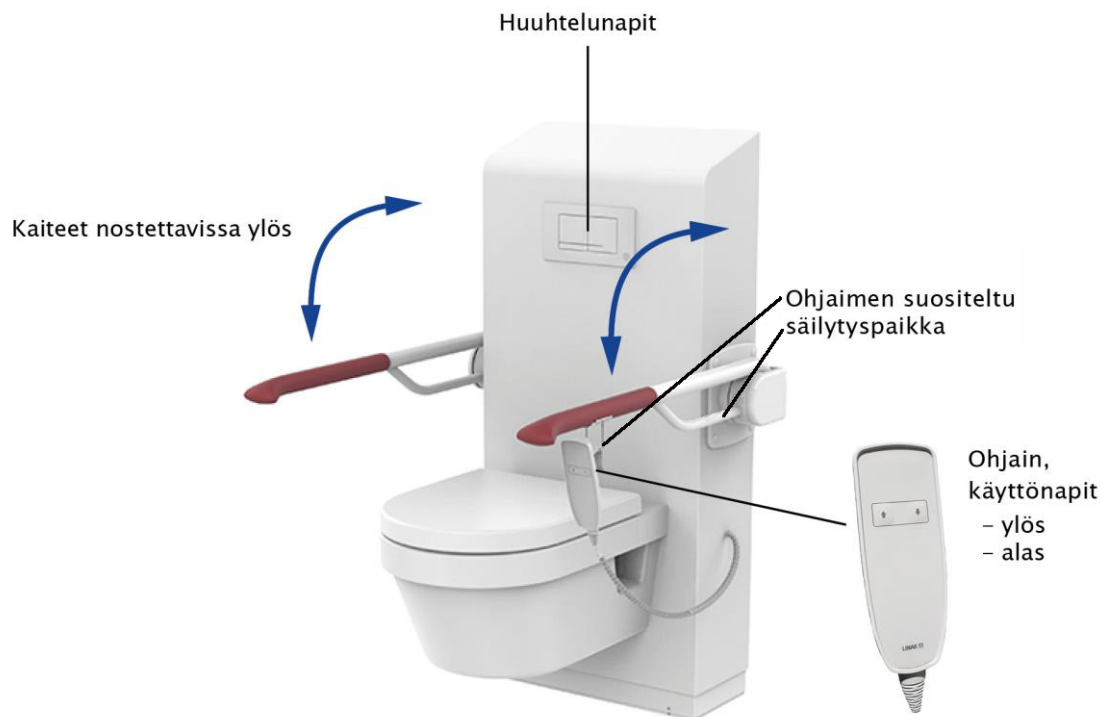

Käyttö

Duo on sähkökäyttöinen WC-istuimen korkeudensäätölaite, joka nostaa ja laskee WC-istuinta käyttäjän tarpeen mukaan. Duo voi kuormittaa maksimissaan 200kg ylös/alas liikkeessä. Duon korkeudensäätö on 200 mm, 420 mm – 620 mm lattiasta. Korkeutta säädetään ohjaimen nuolinäppäimiä painamalla. Korkeudensäätölaitteessa on kiinteästi asennetut tukikaiteet, jotka ovat nostettavissa ylös, kun ne eivät ole käytössä ja taas laskettavissa alas tarpeen mukaan. Ohjaimen voi ripustaa kaiteen alatankoon. WC huuhdellaan etuseinämässä olevista painonapeista.

Duo-korkeudensäätölaite ja tukikaiteet ovat antimikrobisia.

Puhdistus

Ylläpitosiivouksessa käytetään neutraalia tai heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Ohjeiden mukaista annostelua tulee noudattaa. Paikalliset tahrat tulee poistaa mahdollisimman nopeasti. Päivittäinen puhdistus on paras keino välttää pinttymiä ja värimuutoksia. Pinnat eivät kestä hankaavia pesuaineita ja -välineitä.

Antimikrobisille materiaaleille suositellaan puhdistus- ja desinfektioaineita, jotka eivät muodosta pinnalle kalvoa. Desinfioiva aine tuhoaa mikrobeja ja estää niiden kasvun. Ne sisältävät tensidejä, desinfioivaa ainetta, emäksiä tai happoja. Ne voivat olla vetyperoksidipohjaisia. Mikrokuituisia pyyhkeitä suositellaan niiden tehokkaan mekaanisen vaikutuksen vuoksi.