



## MODULAR-TUKIKAHVAT

Tuotteen pinnalle ihokosketuksessa kertyneet hiki, rasva, iho-voiteet ja muut epäpuhtaudet puhdistetaan käyttäen heikosti emäksistä puhdistusainetta (pH 8–10, alkoholipitoisuus enintään 5 %). Paikalliset tahrat tulee poistaa mahdollisimman nopeasti.

**Päivittäinen puhdistus** on paras keino välttää pinttymiä ja värimuutoksia. Tukikahvoja ei suositella käytettäväksi märkien liinojen tms. kuivaustelineenä, jotta vältetään mahdollisilta pintavärien muutoksilta. Älä käytä voimakkaita emäksiä, valkaisuaineita, kuten kloriittia, asetonia, ksyleeniä, väkevää etikkaa tai muita vahvoja liuottimia.

Lisätietoja: [www.korpinen.com](http://www.korpinen.com)