

"Allas on parantanut merkittävästi herra Mannin elämänlaatua"

ROPOX QUICKWASH

IHANTEELLINEN PESUALLAS PIENIIN TILOIHIN – KORKEUS JA ETÄISYYS SEINÄSTÄ SÄÄDETTÄVISSÄ

- Helppokäyttöinen korkeussäädettävä pesuallasratkaisu
- Vastapainolla herkästi toimiva korkeudensäätö
- Sopii täydellisesti pieniin kylpyhuoneisiin, joissa on ahtaat kääntötilat
- Säädettävissä yläasentoon pois tieltä
- Nopea säätö seisovan käyttäjän korkeudelta pyörätuolikäyttäjän korkeudelle
- Selkeälinjainen, huomiota herättämätön muotoilu
- Enemmän jalkatilaa ja syvyyttä pyörätuolikäyttäjän tarpeisiin: 630 mm valmiista seinäpinnasta
- Laskettaessa allas liikkuu tasaisesti eteen- ja alaspäin
- Altaan säätö:
 - Ylös- ja alaspäin: 140 mm
 - Eteen- ja taaksepäin: 100 mm
- Toimitetaan valmiiksi koottuna – helppo asentaa kiinteään seinäpintaan
- Asennettavissa käyttäjän korkeudelle
- Toimii ilman sähköä

KORPINEN

ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AdLife®

ROPOX QUICKWASH

Korkeudensäätö: 140 mm
Säätö eteenpäin: 100 mm
Käyttäjän enimmäispaino: 150 kg

(Testattu standardin DS/ISO 17966:2016 mukaisesti)

OMINAISUUDET

Mekaaninen vastapaino Toimii ilman sähköä

Helppokäyttöinen vapautus-
kahva toimii myös
pyyhelineenä

Jalkatila: 630 mm

Asentolukitus lukitsee altaan yläasentoon

Selkeälinjainen, huomiota herättämätön muotoilu

Säädettävissä nopeasti seisovan käyttäjän korkeudelta istuvan käyttäjän korkeudelle



Eteen- ja taaksepäin: 100 mm
Ylös- ja alaspäin: 140 mm

KORKEUDENSÄÄTÖ

Pesualtaan korkeutta säädetään manuaalisesti.


Säätäminen yläasennosta ala-asentoon

(1) Paina altaan vasemmalla puolella olevaa harmaata vapautusvipua kohti pesuallasta
(2) Pidä vapautusvipu painettuna ja vedä samalla pesuallasta alaspäin, kunnes se on ääriasennossa.


Säätäminen ala-asennosta yläasentoon

Työnnä tai nosta pesuallasta, kunnes kuulet lukitustapin napsahtavan paikoilleen.

MITAT

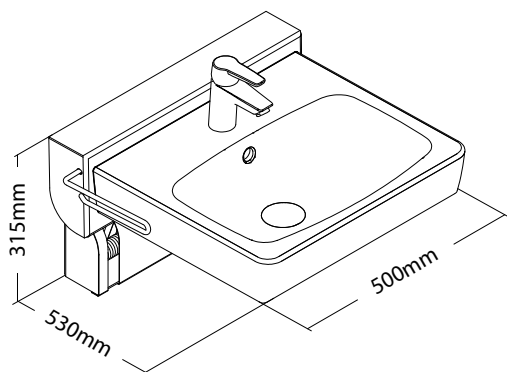

QuickWash yläasennossa

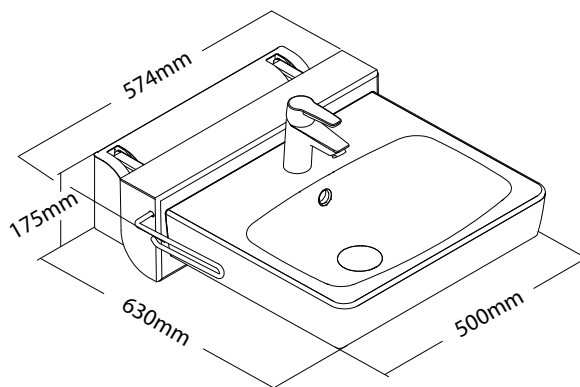

QuickWash ala-asennossa

KORPINEN

Väinö Korpinen Oy,
Kalkkipellontie 6,
FI-02650 Espoo

Tel. +358 9 5491 4400
korpinen@korpinen.com
www.korpinen.com