



Asennusohjeen liite: Sense-tukikaide sisäänrakennetulla Oras Bidetta-käsisuihkun liitäntäkaapelilla

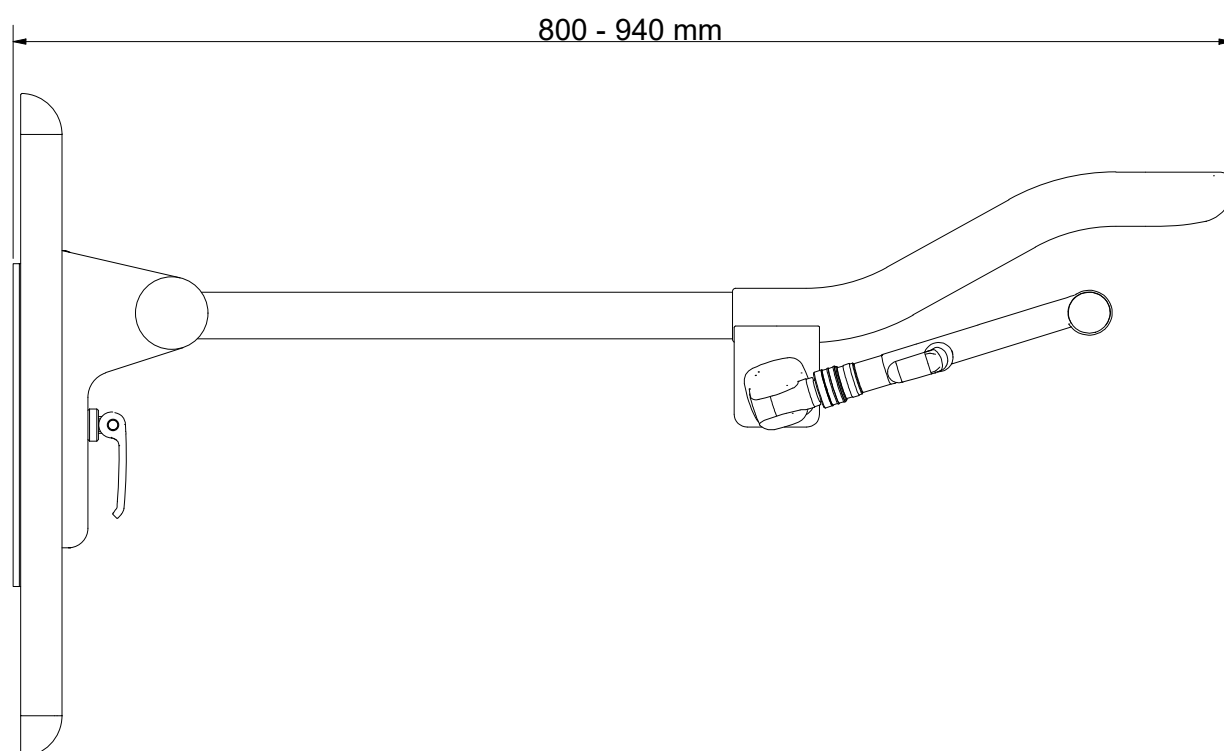


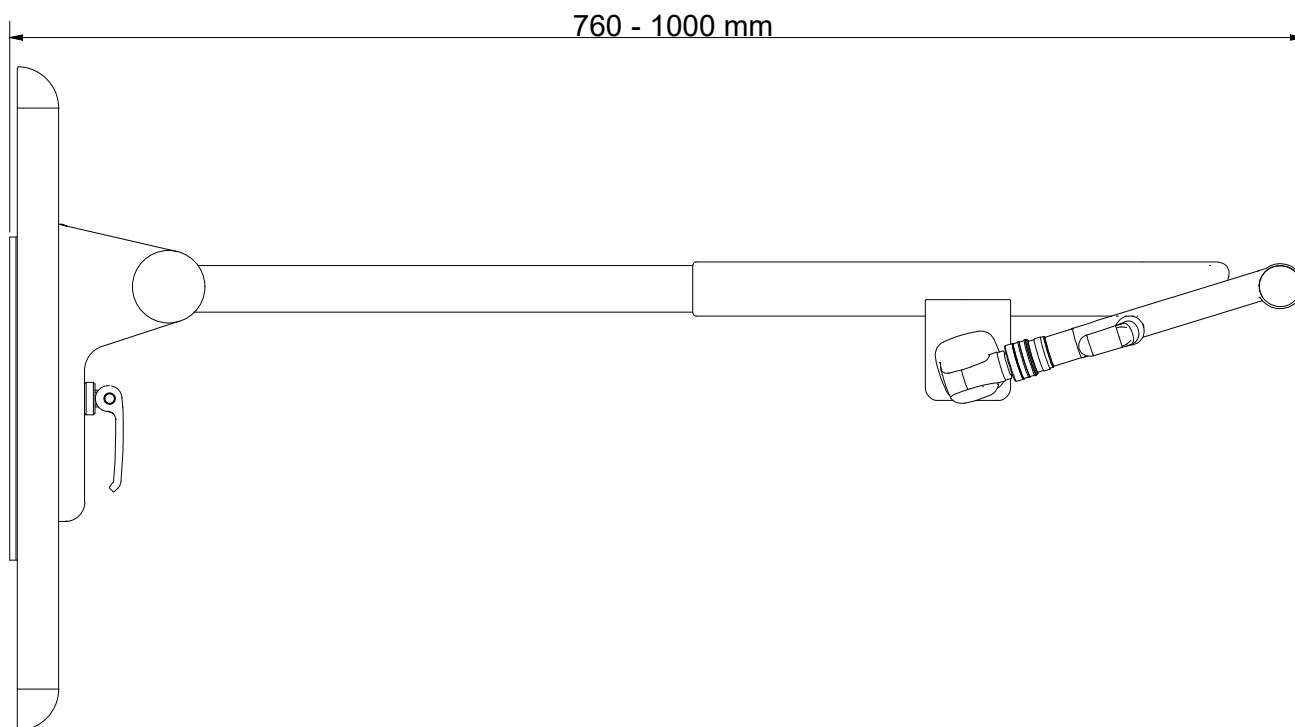

Asentamisen erityisohjeita




Asentamisessa noudatetaan muilta osin Sense-tukikaiteen asennusohjetta.

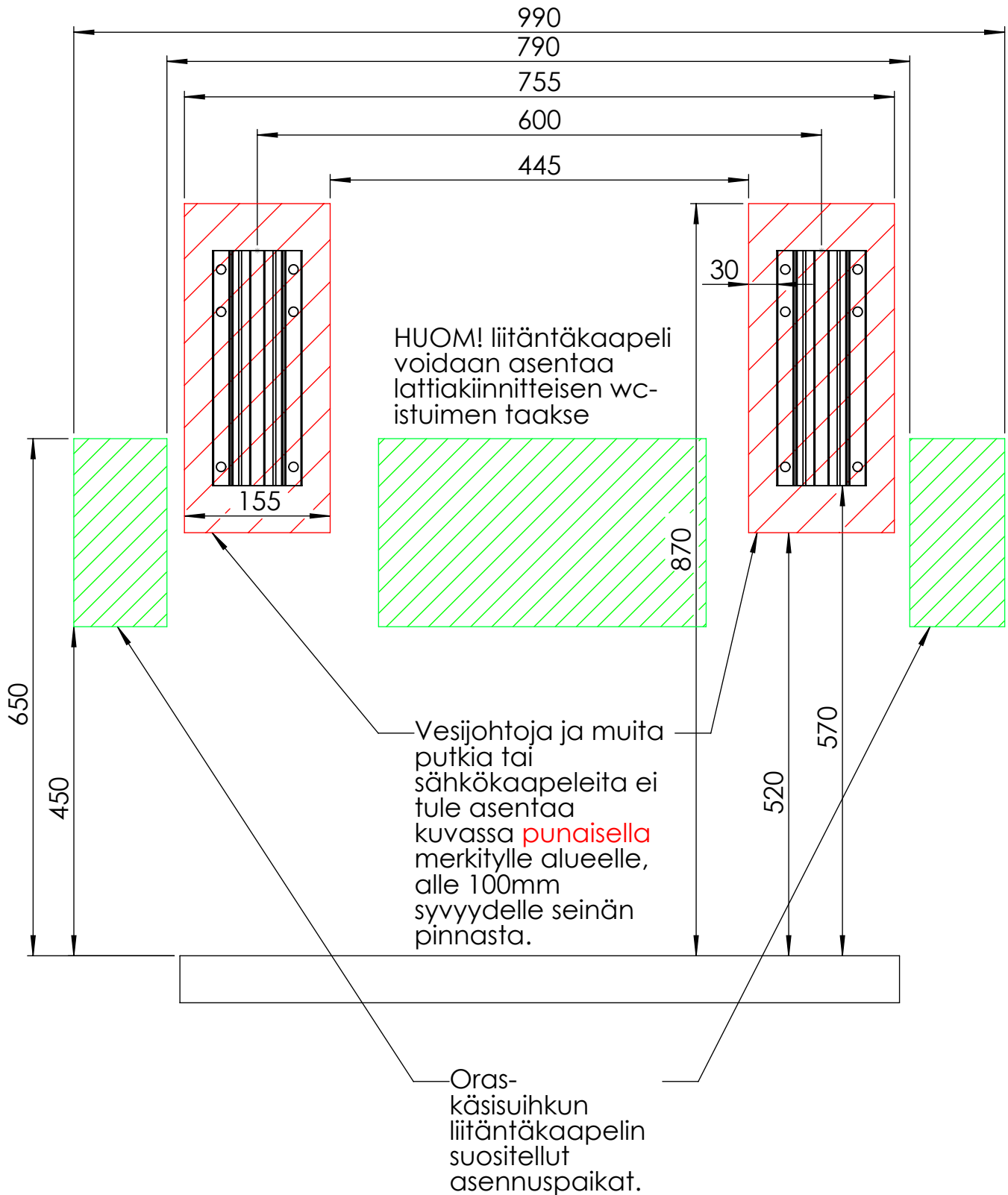



Kaapeli kiinnitetään nippusideankkurin avulla
punaisella merkitylle alueelle tukikaiteen sivuun.

Kaapeli kaiteen vasemmalla puolella:

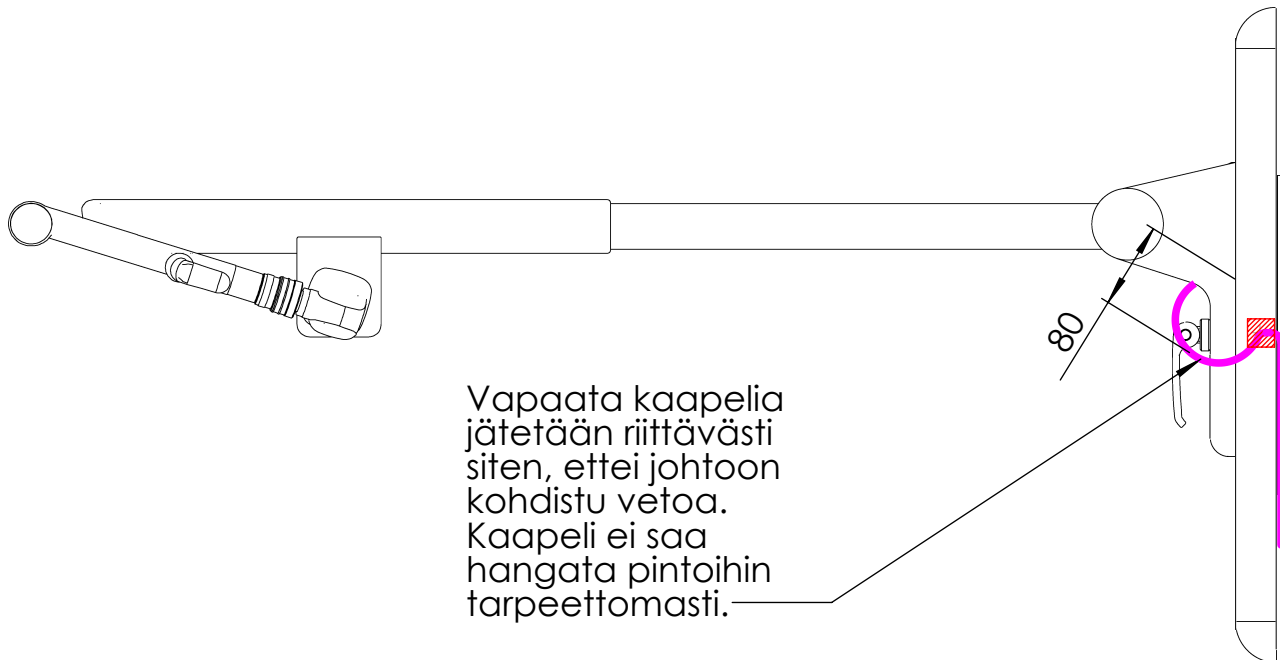


Kaapeli kaiteen oikealla puolella:

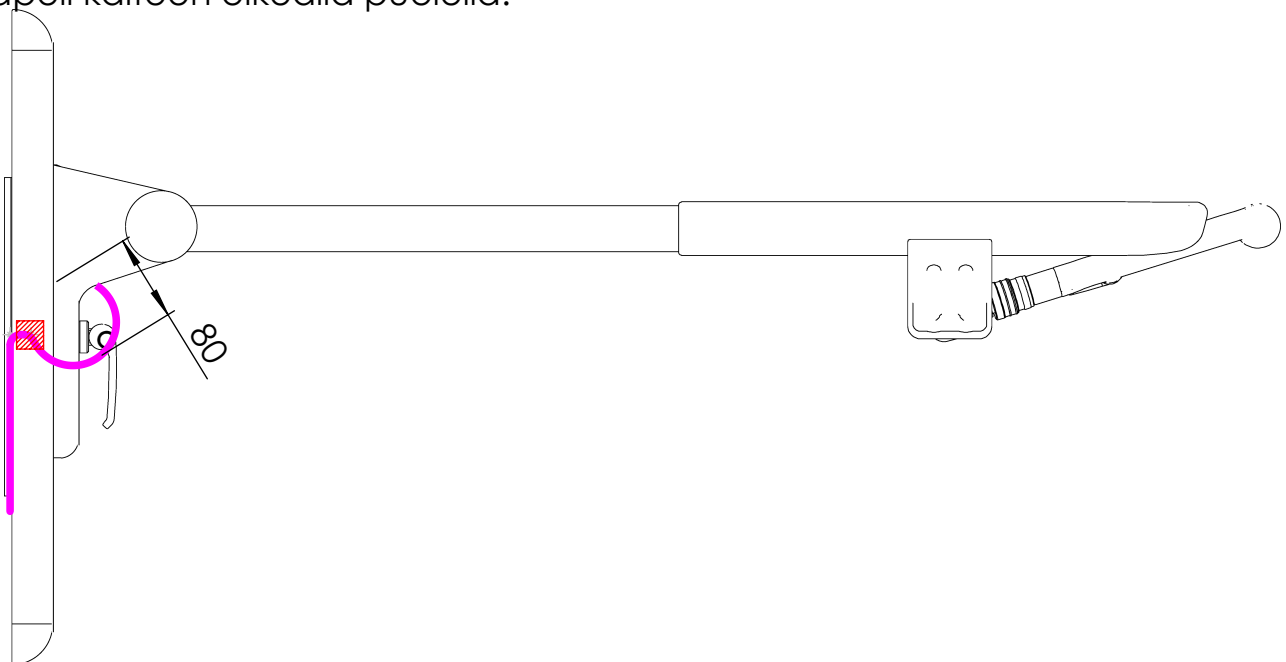

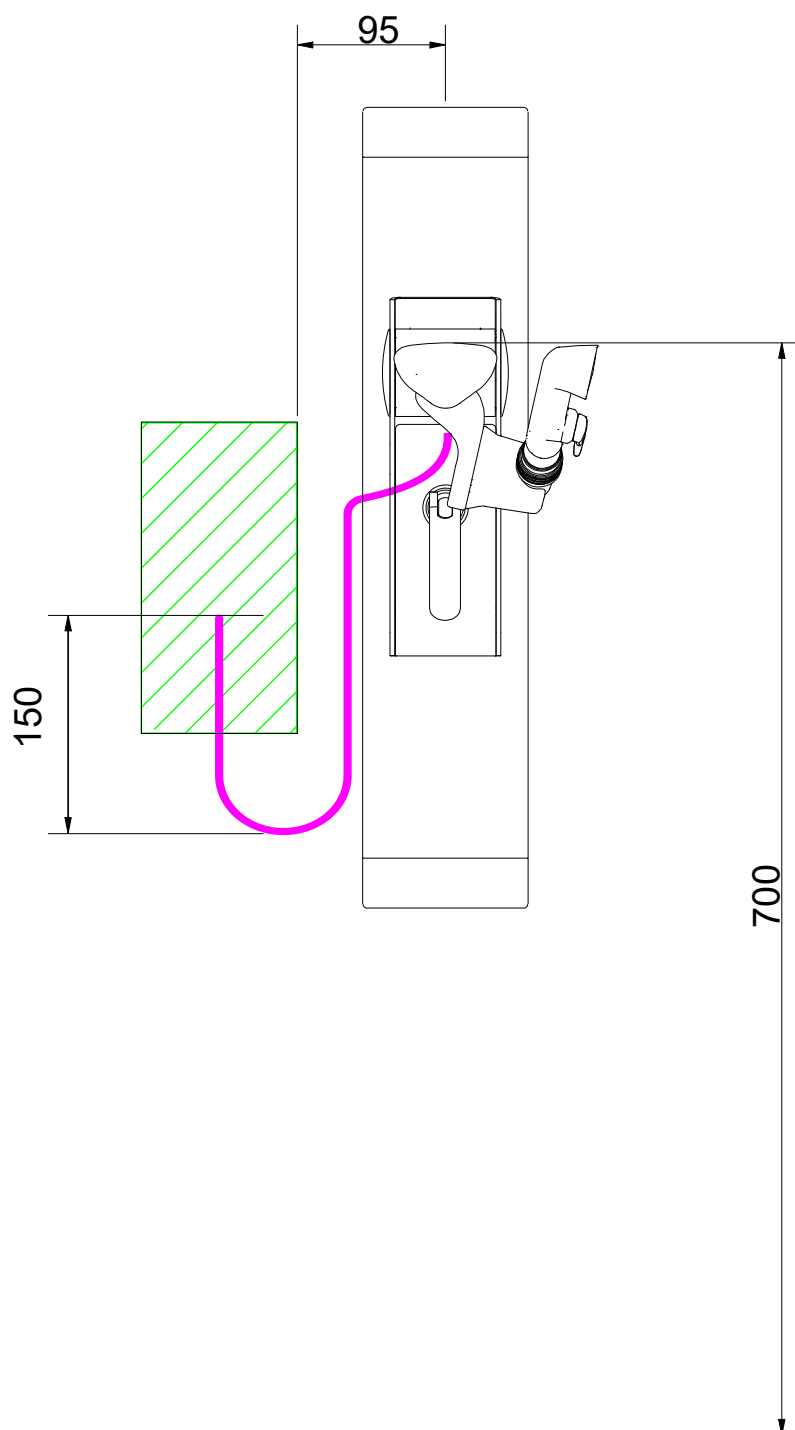

HUOM! Kuvassa kaide korkeussäädön alimmassa asennossa.

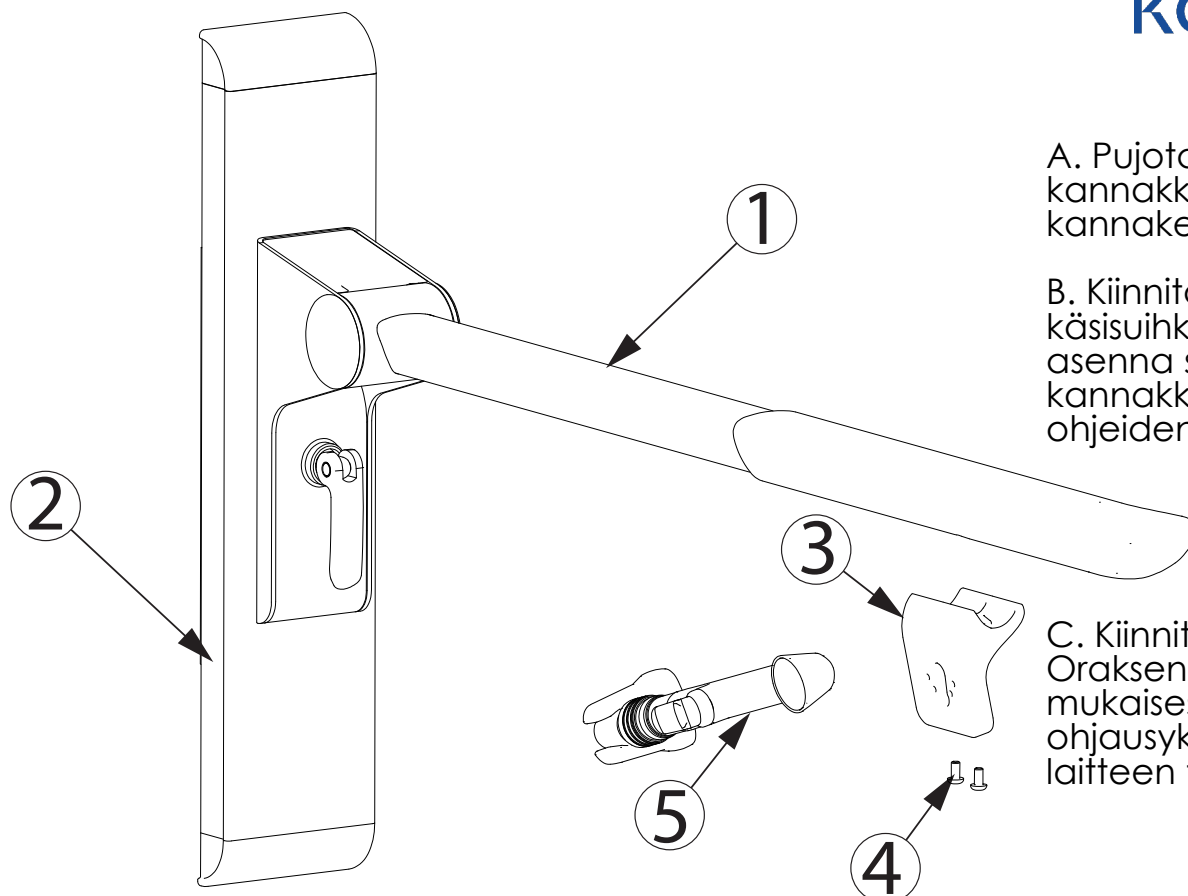

A. Pujota kaapeli kannakkeen läpi. Asenna kannake ruuveilla.

B. Kiinnitä Oraksen kaapeli käsisuihkun ripustimeen ja asenna se kannakkeeseen Oraksen ohjeiden mukaisesti.

C. Kiinnitä liitäntäkaapeli Oraksen ohjeiden mukaisesti ohjausyksikköön ja kokeile laitteen toiminta.

Nro.	Tuotenumero	Nimi	Muu huomio
1	Useita*	Sense-tukikaide Oras liitäntäkaapelilla	WC-istuimen toiselle puolelle vastaava tukikaide ilman johtoa.
2	41200	Korkeudensäätkisko Sense-tukikaiteeseen	Säätövara 200 mm
3	17721	Kannake käsisuihkupidikkeelle Sense-tukikaiteeseen	Toimitetaan tukikaiteen mukana
4		Oras Electra – pesuallashanapaketti käsisuihkulla	Lisätiedot ja tilaus Oras-jälleenmyyjältä
5		Kannakkeen kiinnitysruuvit	Toimitetaan tukikaiteen mukana
	1722	WC-paperiteline Sense-tukikaiteeseen	
	41220	Varaus korkeussäädettävälle Sense-tukikaiteelle	
	41230	Korkeussäädettävä kiinnityslaippa Sense-tukikaiteelle varaukseen 41220	

*Lisätietoa www.korpinen.com