

# Arctic 17

## Nojatuoli hyvinvointiin

KORPINEN

- A PART OF AddLife



Itsenäisyyttä · Turvaa · Elämänlaatua

# Arctic 17 -nojatuoli hyvinvointiin

Arctic 17 -nojatuoli on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat apua tuolista nousemiseen. Sitä on helppo säätää ja se on muutettavissa istuma-asennosta kokonaan kallistettuun makuuasentoon. Siksi se on paljon enemmän kuin kohottautumistuoli – se on nojatuoli hyvinvointiin. Arctic 17 voi tarjota ylellisen ja rentouttavan asennon lepäämiseen ja TV:n katseluun kenelle tahansa, mutta valmistajan, norjalaisen Hepron yli 30 vuoden kokemus apuvälineistä sekä tiivis yhteistyö terapeuttien ja käyttäjien kanssa on kehittänyt Arctic 17 -nojatuolista tuotteen, joka tarjoaa erityisesti vanhuksille ja vammaisille riippumattomuutta, turvallisuutta ja parempaa elämänlaatua – mahdollisuuden asua pidempään itsenäisesti kotona. Nojatuoli helpottaa asennon vaihtamista jatkuvasti makuu- ja istuma-asennossa oleville. Hoivakotiympäristössä Arctic 17 -nojatuoli mahdollistaa osallistumisen yhteisten tilojen tapahtumiin turvallisesti omassa tuolissa. Se toimii myös sairaaloissa hoitokäytössä.

Turvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista, joita Arctic 17 tarjoaa käyttäjälleen. Kehitetty nostomekanismi tekee tuolista vankan ja vakaan. Se nousee niin ylös, että jopa hyvin pitkät ihmiset pystyvät kävelemään siitä suoraan eteenpäin. Nojatuoliin on kehitetty istuintyyyny, jonka uusin vaahdotekniikka ja kaksi vaahtoerosta helpottavat paineensietoa, parantavat entisestään istumismukavuutta ja antavat tukea myös pitkään istuttaessa tai makuuasennossa.



Lisävarusteena saatavana olevalla pöydällä kahvikuppi ja mielenkiintoinen kirja kädessä lisäävät elämään hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Lisämukavuutta saadaan säätämällä tuoli makuuasentoon, josta on taas helppoa palata turvallisesti lepo- ja istuma-asentoon. Tuolissa on USB-laturi, jolloin puhelimen, tabletin tai muiden hyvinvointiteknologialaitteiden käyttö on mahdollista myös niiden lataamisen aikana.

Jotta nojatuoli sopisi mahdollisimman monelle, on siitä saatavana monta eri leveyttä, siinä on erilaisia säätömahdollisuuksia ja tarjolla on laaja lisävarusteiden valikoima. Näin tuoli vastaa eriomaisesti ajan myötä muuttuviinkin käyttäjän tarpeisiin. Tuolin toiminnot on suunniteltu helppokäyttöisiksi. Toimintoja säätävän käsiohjaimen värit ja kuvakkeet ovat hyvin näkyviä ja ymmärrettäviä.

Arctic 17 -tuolilla on nykyaikainen, ajaton ulkonäkö, joka näyttää hyvältä missä tahansa tilassa. Tuolissa on puhtaat linjat ja eläväpintainen kangas- tai nahkaverhoilu, jotka näyttävät uudelta jopa monien vuosien käytön jälkeen. Käytetyt materiaalit, kangas, nahka ja tammi sopivat luonnollisesti kodin muihin huonekaluihin.

# Uusi Arctic 17

– mekanismituoli kaikkiin tarpeisiin



# Arctic 17 -valikoima



**Standard**-malleissa on erikseen selkänojan ja jalkatuen säätö. Tuoleissa on kontrastivärisillä painikkeilla varustetut ohjaimet, joilla toimintoja on helppo käyttää.

Hyvä valinta kaikille lepotuolia tarvitseville.



Käyttäjä voi säätää selkänojaa/ korkeutta ja jalkatukea erikseen neljällä painikkeella.



Kokonaan makuuasentoon kallistuva **Tilt** on edistysmallimme. Tuolit voi kallistaa kokonaan taakse täydelliseen makuuasentoon.

Kaikki Tilt-mallit voidaan kallistaa taakse niin, että jalat saadaan pään tason yläpuolelle.

Sopii niille, jotka viettävät suuren osan päivästä tuolissa ja kaipaavat asentojen vaihtelua painehaavojen välttämiseksi.



Käyttäjä voi säätää selkänojaa/korkeutta, jalkatukea ja kallistusta erikseen kuudella painikkeella. Ylhäällä vasemmalla olevalla painikkeella tuolin saa nousemaan suoraan ylös kaikista asennoista.

**UUSI SYNCHRON-TOIMINTO:** Jalkatuki ja selkänoja liikkuvat synkronoidusti niin, että lantioon kohdistuu mahdollisimman vähän rasitusta asentoa vaihdettaessa. Keventää jalkojen painetta kätevästi televisiota katsellessa tai kirjaa lukiessa.

**Synchron**-malleissa selkänojan ja jalkatuen sähköinen toiminta on yhdistetty. Tuolin säätäminen on helppoa ja siihen tarvitaan vain kaksi painiketta. Malli sopii niille, jotka tarvitsevat yksinkertaisia säätömahdollisuuksia.

Sopii erityisesti käyttäjille, joiden kognitiiviset kyvyt ovat heikentyneet.



Jalkatuki nousee 23,4 astetta. Selkänoja ei liiku.



Selkä kallistuu 58,4 astetta taakse. Se laajentaa istuinkulmaa. Jalkatuki pysyy paikallaan.



Jalkatuki nousee ylimpään asentoon. Selkänoja ei liiku.



Selkänoja kallistuu taaksepäin. Näin pääset parhaaseen lepoasentoon.





# Arctic 17 istuinleveydet



**17/40**

Nahka (musta)  
/Kangas (harmaa)

Istuimen leveys	Käyttäjän paino
-----------------	-----------------

40-50 cm	< 165 kg
----------	----------



**17/45**

Nahka (musta)  
/Kangas (harmaa)

Istuimen leveys	Käyttäjän paino
-----------------	-----------------

45-55 cm	< 165 kg
----------	----------



**17/50**

Nahka (musta)  
/Kangas (harmaa)

Istuimen leveys	Käyttäjän paino
-----------------	-----------------

50-60 cm	< 165 kg
----------	----------



**17/55**

Nahka (musta)  
/Kangas (harmaa)

Istuimen leveys	Käyttäjän paino
-----------------	-----------------

55-65 cm	< 165 kg
----------	----------



**17/60**

Nahka (musta)  
/Kangas (harmaa)

Istuimen leveys	Käyttäjän paino
-----------------	-----------------

60-70 cm	< 166-260 kg
----------	--------------

## Arctic 17 -tuolin mukauttaminen omiin tarpeisiin

Niskaongelmat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Säädä ylemmän selkänöjan kulma sopivaan asentoon.</li> <li>Valitse oikean kokoinen ja sopivan kiinteä niskatyyppi. Katso vaihtoehdot lisätarvikeosiosta.</li> </ul>
Tasapaino-ongelmat ja tarve asentoa tukevalle tuolille	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valitse tukea antava selkänöjan lisäosa, kuten kylkiä tukeva malli.</li> </ul>
Selkänöjan lisäosien tarve esimerkiksi kyfoosin, skolioosin ja muiden asentovirheiden vuoksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kokeile selkänöjan Comfort-päällistä, jonka kuitutäytettä voi muotoilla käyttäjän tarpeiden mukaan.</li> </ul>
Sormien tai käsien heikentynyt toiminta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä ohjausvipu (joystick)-säädintä käsiohjaimen sijaan. </li> </ul>
Erityisen pehmeän istuimen tarve	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä erityisen pehmeää istuintyyppiä tai superpehmeää päällistä.</li> <li>Käytä selkänöjan Comfort-päällistä.</li> </ul>
Alaselän erityisen tuen tarve	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä puhallettavaa ristiselän tukea. Tyynystä on saatavilla kaksi kokoa.</li> <li>Käytä pientä tai suurta ristiselän tukityyppiä, joka voidaan kiinnittää selkänöjaan juuri sopivaan kohtaan.</li> </ul>
Inkontinenssiongelmat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä inkontinenssisuojaa istuimessa, selkänöjassa ja tarpeen mukaan jalkatuessa.</li> </ul>
Painehaavojen riski	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä painetta lievittävää istuintyyppiä, geeli-istuintyyppiä, superpehmeää päällistä tai tasaista istuinosaa erikoistyyppien kanssa.</li> </ul>
Jalkojen erityisen tuen tarve	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä saksimekanismilla toimivaa jalkatuen laajennussarjaa. Tämä kasvattaa jalkatukea ulospäin 13 cm.</li> </ul>
Tarve käyttää tuolia vasemmalta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilausvaiheessa kääntymisvipu ja ohjaimen pidike voidaan siirtää vasemmalle puolelle.</li> </ul>
Tuolilta putoamisen riski	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä ylä- ja/tai lannevyötä.</li> </ul>
Tarve siirtää tuolia nousematta siitä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä pyörällistä jalustaa, jossa jarrutoiminto.</li> </ul>

## Itsenäisyyttä • Turvaa • Elämänlaatua

### Tietoja valmistajasta:

HEPRO AS valmistaa ja myy korkealaatuisia apuvälineitä, jotka tekevät arkielämän helpommaksi asiakkaille.

Heprolla on pitkä kokemus (1987–) tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä toimintaterapeuttien kanssa liikkumisen, tasapainon, mukavuuden ja hygienian aloilla. Tavoitteena on luoda turvaa, itsenäisyyttä ja parempaa liikuntakykyä toiminnallisten ja käyttäjälähtöisten tuotteiden avulla.

### Markkinointi ja myynti Suomessa:

Korpinen on esteettömyyden pioneeri, joka tarjoaa tinkimättömiä ja asiakaskohtaisesti suunniteltuja kylpyhuoneratkaisuja sekä muita apuvälineitä.