

Manuaalin ja asennusohjeen
tulee jäädä käyttäjälle
asennuksen jälkeen.

Bidette R3

-manuaali

Tuotenro SC11 122



SC 0185 B

Bidette R3 käsituilla (lisävaruste)


Tuotekuvaus

Bidette R3 on pesevä ja kuivaava WC-istuinlaite. Se on helppo asentaa käytössä olevaan wc-istuimeen. Suihkua ja kuivausta ohjataan käsiohjaimella. Bidette R3 voidaan helposti ohjelmoida käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Bidette R3 WC-istuinlaitteessa on asianmukaiset oletusasetukset, joten se on asennuksen jälkeen heti käyttövalmis. Termostaattisekoittajan vedenpaine ja lämpötila voidaan säätää omien toiveiden mukaisiksi.

Bidette R3 - Kuinka se toimii

Täysautomaattinen

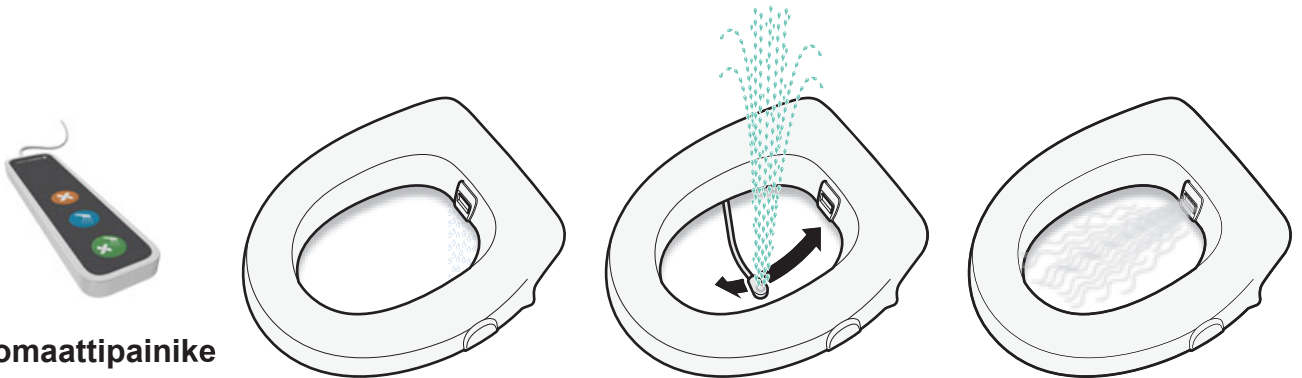


Automaattipainike

Yksi painallus vihreään automaattipainikkeeseen ja

Bidette R3: —> esihuuhtelee kylmän veden pois —> suihkuttaa —> ja kuivaa

Voit aina keskeyttää toiminnon. Voit myös siirtyä eteenpäin seuraavaan toimintoon yhdellä lisäpainalluksella. Mikäli Bidetteä on käytetty 15 minuutin sisällä, suihkutus alkaa suoraan ilman esihuuhtelua.

Puoliautomaattinen

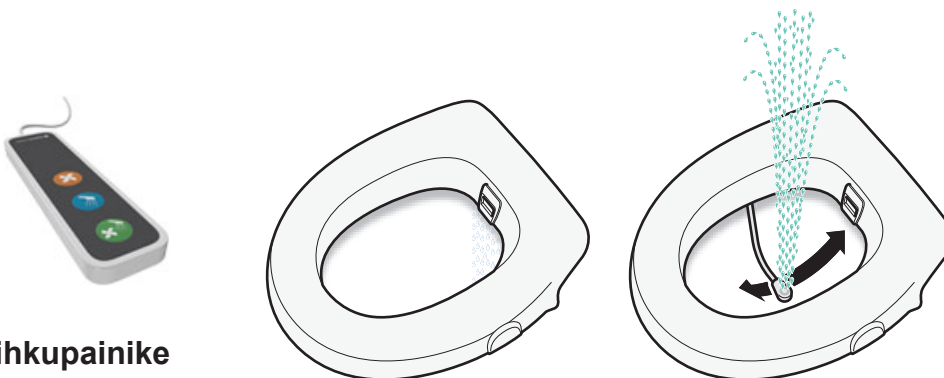


Suihkupainike

Yksi painallus siniseen suihkupainikkeeseen ja

Bidette R3: —> esihuuhtelee kylmän veden pois —> suihkuttaa

Yksi lisäpainallus ja vedentulo pysähtyy.

Mikäli Bidetteä on käytetty 15 minuutin sisällä, suihkutus alkaa suoraan ilman esihuuhtelua.

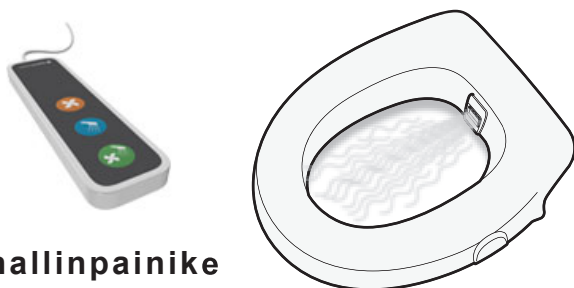


Puhallinpainike

Yksi painallus oranssiin puhallinpainikkeeseen ja

Bidette R3: —> kuivaa

Yksi lisäpainallus ja puhallin pysähtyy.

Vedenpaine ja lämpötila

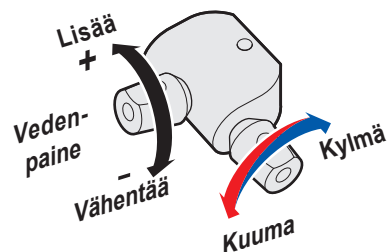

Säädä vedenpaine ja lämpötila termostaatista.
Bidette on nyt käyttövalmis.

Bidette R3 on helppo säätää

Yleisasetukset

1. Paina **POWER** -painiketta, paneelin valot syttyvät
2. Vaihda asetuksia painikkeista. Luku nousee joka painalluksella, kunnes se saavuttaa maksimiarvon ja palaa takaisin minimiin.
3. Valmista! Paneeli menee pois päältä 15 minuutin jälkeen.

 = Oletusasetukset

Bidette R3 WC-istuinlaitteessa on hyvät oletusasetukset. Mikäli käyttäjä ei halua, lisäsäätöjä ei tarvitse tehdä.

Painikkeet



Pesuaika

Vesisuihkujen toiminta-aika sekunneissa (8 - 90 sekuntia).

Kuivausaika

Kuivausaika minuuteissa (2 - 9 minuuttia).

Kuivausteho

Puhaltimen ilmavirtaus (min - max).

Kuivauslämpötila

Puhaltimen kuivauslämpötila (min - max).



Reset (palauttaa alkuasetukset) Paina painikkeesta 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.




Lock, lock up Paina painikkeesta 3 sekunnin ajan. Kun Bidette on lukko-asennossa (**LOCK**-valo palaa) ainoastaan käsiohjaimen vihreä automaattipainike toimii ja istuinsensori on aktivoitu. (**SIT** -valo palaa). Kun käsiohjaimen automaattista painiketta painetaan kerran, ohjelma alkaa ja suoritetaan loppuun asti, vaikka muita painikkeita painettaisiin. Ohjelma keskeytyy, mikäli käyttäjä nousee ylös istuimelta pesun aikana ja suihkuvarsi palautuu alkuasentoon.

Asetukset*

1. Paina **POWER** - painikkeesta, paneelin valot syttyvät
2. Paina *-painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes **WATER**-valo alkaa vilkkua
3. Vaihda asetukset
4. Paina lopuksi *-painiketta

 = oletusasetukset

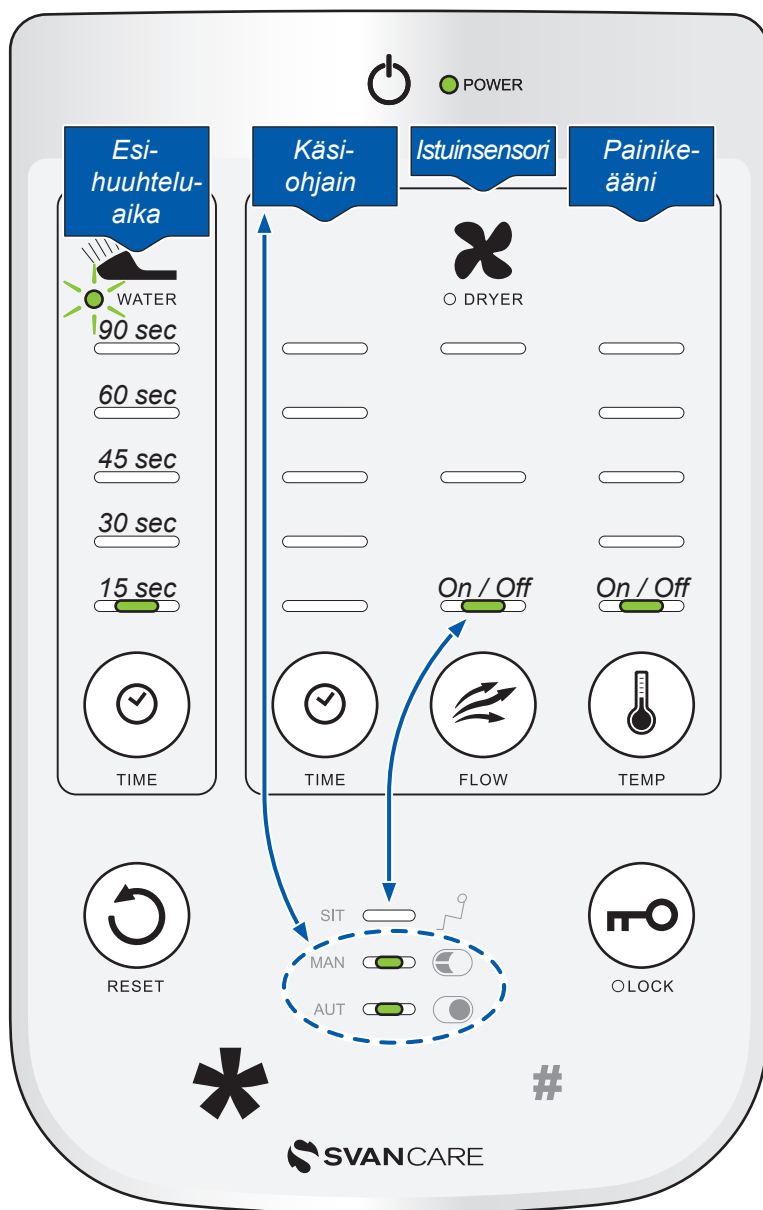

Esi-huuhtelu-aika

Kylmän veden huuhtelu-aika sekunneissa (15 - 90 sekuntia).

Käsi-ohjain

Valitse kolmesta eri vaihtoehdosta: **manuaalinen, automaattinen, manuaalinen + automaattinen**

Istuinsensori

Valitse **On/päällä** tai **Off/pois päältä**. Mikäli valo on päällä, sinun täytyy istua wc-istuimelle, jotta se toimisi. Mikäli valo ei ole päällä, Bidette toimii vaikka kukaan ei istuisikaan siinä.


Painike-ääni

Valitse **On/päällä** tai **Off/pois päältä**.


Asetukset

1. Paina **POWER**-painiketta, paneelin valot syttyvät
2. Paina **#** -painiketta 3 sekunnin ajan, DRYER-valo alkaa vilkkua
3. Vaihda asetuksia
4. Paina lopuksi **#** -painiketta

 = oletusasetukset

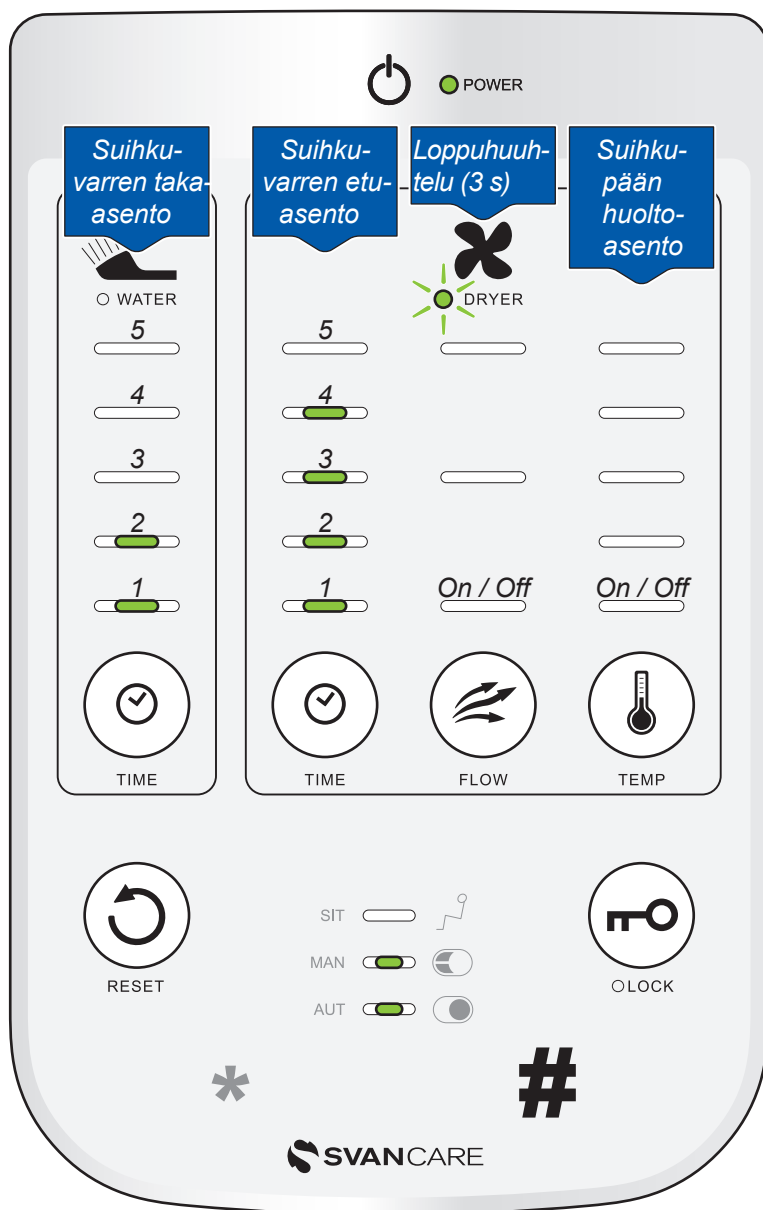

Suihkuvarren eri asennot

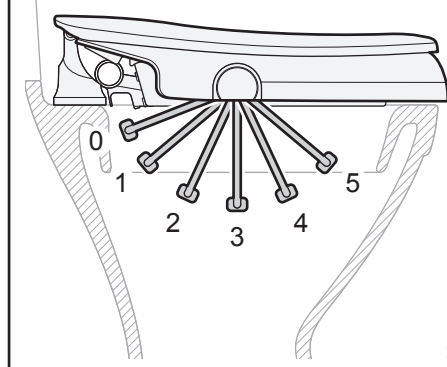

Suihkuvarren taka-asento

Valitse kuudesta eri asennosta (0 - 5 asennot).
Katso kuva yllä.

Suihkuvarren etu-asento

Valitse kuudesta eri asennosta (0 - 5 asennot).
Katso kuva yllä.


Loppuhuuhdeltu

Valitse **On/päällä** tai **Off/pois päältä**, kesto 3 sekuntia.

Suihku-pään huolto-asento

Valitse **On/päällä** tai **Off/pois päältä**. Suihkuvarsi jää suoraan ala-asentoon huoltoa varten (asento 3).

Bidette R3, osaluettelo

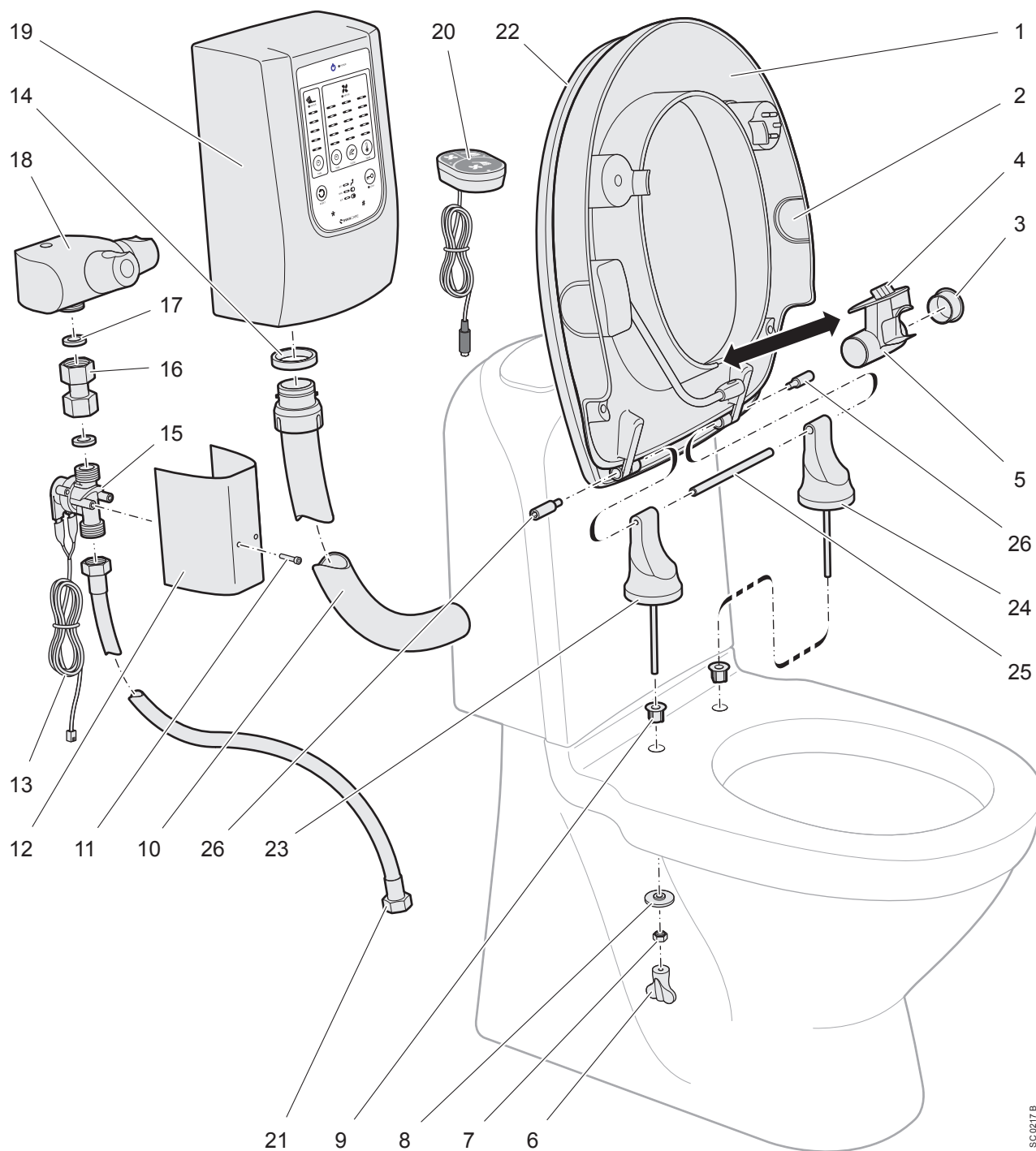

SC0217 B

Valmistaja Svan Care varaa oikeuden muutoksiin.

Osaluettelo Bidette R3

Nro	Määrä	Nimike	Tuotenro	Nro	Määrä	Nimike	Art. no.
1	1	Täydellinen istuin kannella	11 251	14	1	Ilmaletkun tiiviste	11 247
2	2	Sivusuoja	11 207	15	1	Vesiventtiili	11 324
3	1	Ilmasuuttimen tulppa	11 271	16	1	Liitin	11 336
4	1	Ilmasiipi	11 205	17	2	Tiiviste	11 337
5	1	Ilmasuutin	11 204	18	1	Termostaattisekoittaja, standard	10 238
6	2	Mutterin kiristin	11 259	19	1	Puhallinkoneisto R3/M3	11 298
7	2	Mutteri	11 254	20	1	Käsiohjain R3	11 246
8	2	Prikka	11 253	21	1	Korkeapaineletku	11 334
9	2	Posliinireiän suojakartio	11 252	22	1	Kansi	11 243
10	1	Ilmaletku	11 331	23	1	Sarana, oikea	11 273
11	2	Ruuvi	11 339	24	1	Sarana, vasen	11 274
12	1	Venttiilin suojakansi	11 338	25	1	Saranatappi	11 275
13	2	Vesiventtiilin kaapeli	11 379	26	2	Kinnityspultti	11 276

Vinkkejä

Lue manuaali tarkasti saadaksesi lisätietoja tuotteen toiminnoista ja säätömahdollisuuksista. Bidette R3 on helppo ohjelmoida jokaisen käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Bidetten lukitustoiminto (lock) helpottaa käyttäjää, jonka kognitiiviset toiminnot ovat heikentyneet. Tarkempi kuvaus lukituspainikkeesta (lock) sivulla 3.

Mikäli käyttäjällä on vaikeuksia nousta ylös, asenna käsituet Bidette R3:een tai käytä Lift-nostinta. Voit käyttää suihkutuolia Bidette R3:n kanssa, sillä vesisuihku tulee alapuolelta.

Tarkista nettisivuiltamme uusimmat päivitykset ja lisävarusteet Bidette R3:een: korpinen.com

Bidette R3, tekniset tiedot:

Istuimen maksimi käyttöpaino: 380 kg

Käsitukien maksimi käyttöpaino: 75 kg/käsituki

Istuimen korkeus (WC-istuimen päällä): 65 mm



Tärkeää

Henkilöiden (myös lapset), joilla on alentunut fyysinen tai psyykinen toimintakyky tai jotka ovat tottumattomia, ei tule käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa tai ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön antamaa koulutusta tuotteen käyttöön.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki tuotteella.

Tuotteen puhdistaminen



Kuva 1

Puhdista puhallinkoneisto ja termostaattisekoittaja kostealla liinalla.


Puhdista wc ja Bidette laimealla puhdistusaineella.

Voit irroittaa ilmaletkun (pos 1) puhdistamista varten.



SC 0184 C

2

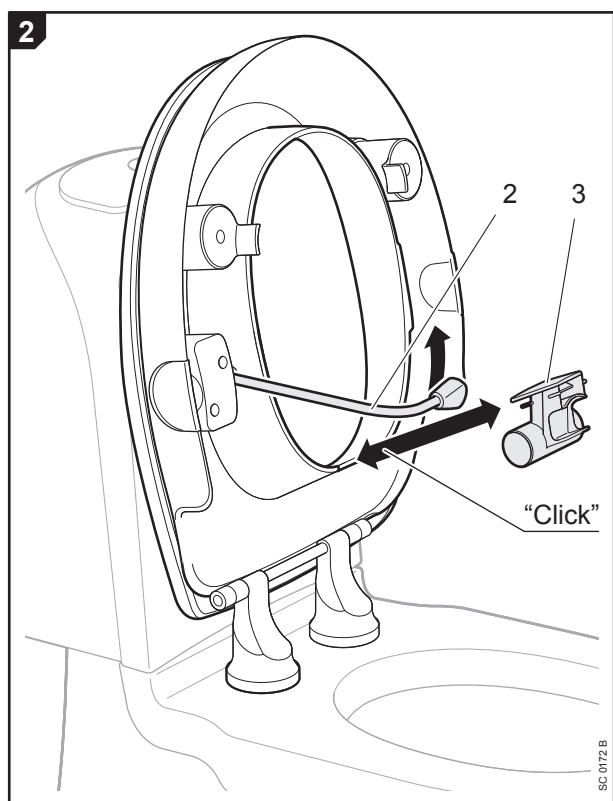

SC 0172 B

Kuva 2

Nosta istuin.

Käännä suihkuvarsi (pos 2), jotta se ei lukitse ilmasuutinta.

Tämän jälkeen voit irroittaa ilmasuuttimen (pos 3) puhdistamista ja pesua varten.

Maahantuonti ja myynti:
Väinö Korpinen Oy
Kalkkipellontie 6
FI-02650 Espoo
Puh. 09 5491 4400
korpinen@korpinen.com
korpinen.com

KORPINEN

- A PART OF AddLife

SVANCARE®

- A PART OF AddLife