

Nostinliinat

KORPINEN

- A PART OF AddLife



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.

Nostinliinat

Laaja valikoima anatomisesti suunniteltuja nostinliinoja, jotka on kehitetty potilaan turvallisuutta ja mukavuutta ajatellen.

Yli 29 erilaisen nostinliinan valikoima mahdollistaa oikeanlaisen nostinliinan oikean kokoisena ja vastaamaan parhaiten käyttäjän tarpeisiin. Nostinliinat valitaan käyttäjän koon, vartalon hallinnan ja muiden erityistarpeiden mukaisesti tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla hänen toimintakykyään. Ne voidaan asettaa käyttäjälle myös istuma-asennossa. Nostinliinat soveltuvat muidenkin valmistajien nostimiin. Ohessa on perusnostotilanteisiin soveltuvat nostinliinat. Kysy muita vaihtoehtoja korpinen@korpinen.com.

Valitse oikea materiaali oikeaan tilanteeseen

Oikean materiaalin valinta on tärkeää, sillä eri materiaaleilla on yksilöllisiä ominaisuuksia, jotka tukevat erilaisia toimintoja. Tukeva ja pienen kitkan aiheuttava materiaali helpottaa nostinliinan pukemista ja riisumista. Kylpemiseen ja suihkuun valitaan materiaali, joka kuivuu nopeasti ja on helppo puhdistaa. Hengittävät ja pehmeät materiaalit mahdollistavat nostinliinan jättämisen potilaan alle sänkyyn ja pyörätuoliin. Valitse oikea materiaali kuhunkin käyttötarkoitukseen.




Polyesteri – kestävä ja helppo huoltaa

Kestävä materiaali, helppo puhdistaa ja vähäinen kitka, mikä tekee käytöstä yksinkertaisempaa. Polyesteristä valmistettua nostinliinaa ei tule jättää potilaan alle sängyssä tai tuolissa.



Polyesteriverkko – joustava ja ilmava

Pehmeä ja ohut materiaali, joka hengittää ja kuivuu nopeasti. Jonkin verran joustava, joten se voidaan jättää hetkeksi potilaan alle tuoliin tai sänkyyn. Polyesteriverkkomateriaalista valmistettuja nostinliinoja käytetään kylpemisen ja suihkussa käymisen yhteydessä.

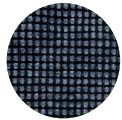

Soft Air Mesh (SAM) - pehmeä, joustava ja erittäin ilmava

Ainutlaatuinen kahteen suuntaan joustava, pehmeä materiaali, joka hengittää erinomaisen hyvin. Voidaan jättää hetkeksi potilaan alle tuoliin tai sänkyyn.



Kertakäyttöinen

Korkean hygienian tarpeeseen tarvittava kertakäyttöinen nostinliina. Käytetään vain yhdelle käyttäjälle.




Erilaiset nostoasennot

Ihmiset ovat erilaisia ja on itsestään selvää, että kaikille ei käy sama nostinliina. Monipuoliset nostinliinat on suunniteltu käyttäjien mukavuutta ja turvallisuutta ajatellen.


2 pisteen ripustus

Sopii useimpiin nostotilanteisiin ja antaa hyvän istuma-asennon. 2-pisteripustus sopii kiinteisiin ja siirrettäviin nostimiin.

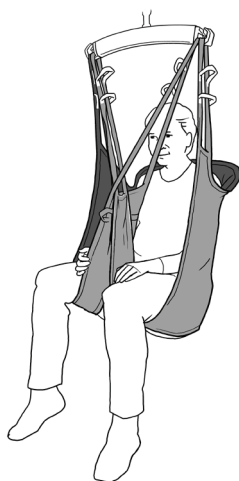

3 pisteen ripustus

Tarjoaa pitkänomaisen istuimen ja tasapainoisemman painon jakautumisen. 3 pisteen ripustus sopii erityisesti potilaille, joilla on lisääntynyt painehaavojen riski. Vain siirrettäviin nostimiin.

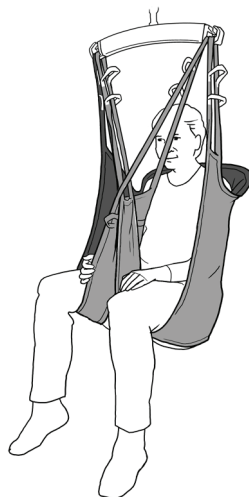

4 pisteen ripustus

Tilava istuin isoille potilaille tai käytettäessä levitintä. 4 pisteen ripustus sopii sekä kiinteisiin että siirrettäviin nostimiin.




Oikean nostinliinan valinta

1

Mittojen tulkinta:

A=aukko, B=vartalon leveys, C= vartalon pituus, D=vyötärölinja

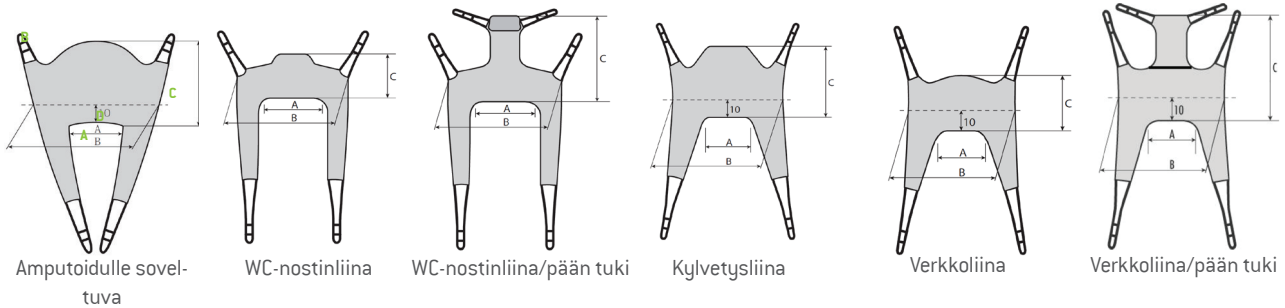

2

Mittaa potilas





Liian suuri liina

Liian pieni liina

Nostettava voi pudota liinasta

Nostettava voi pudota liinasta. Kunto voi huonontua.

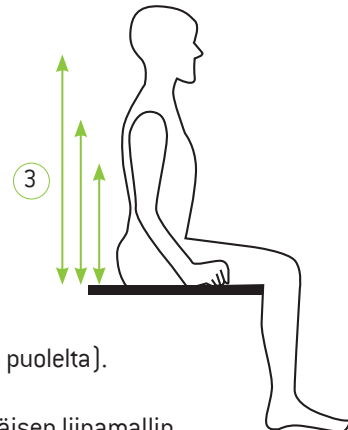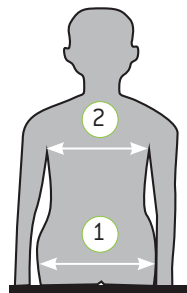

- ① Lantion alueen mittaaminen: Mittaa selän kautta mitta sivulta sivulle (ei vatsan puolelta).
- ② Mittaa selän leveys.
- ③ Mittaa selän pituudet valitessasi matalan, olkapäähän ulottuvan tai korkeaselkäisen liinamallin.

Mittaa aina istuma-asennossa.

3

Nostinliinan käyttötarkoituksen selvittäminen



Nosto pyörätuoliin
tai pois
pyörätuolista



Nosto sängkyyn tai
pois sängystä



Nosto lattialle
tai pois lattialta



WC-käynti/
Peseytyminen



Pukeutuminen/
Riisuutuminen



Kävely/
Kuntoutus

Perusliina

Olkapäämalli, jaetut jalkaosat

- Mukautuu potilaan vartaloon tarjoten hyvän tuen koko selälle
- Pystyasento istuttaessa
- Saatavana kolmesta eri materiaalista valmistettuna



Polyesteri Polyesteri-Soft Air verkko Mesh



Nostinliinan perusmalli mukautuu potilaan vartaloon ja tarjoaa hyvän tuen koko selälle. Tätä liinaa voidaan käyttää useimmissa nosto-olosuhteissa, sopii useimmille potilaille ja on hyvä valinta peruskäyttöön.

Perusliinan materiaalivaihtoehdot ovat polyesteri, polyesteriverkko ja Soft Air Mesh-kangas, jotka antavat kosteuden ja lämmön siirtyä tehokkaasti potilaasta.

Tuotenumero (verkko)	Tuotenumero (trevira)	Tuotenumero (polyesteri)	Koko	Nostokapasiteetti
HCHC25045-JS	HC25050-JS	HC25070-JS	Junior S	300 kg
HC25045-JM	HC25050-JM	HC25070-JM	Junior M	300 kg
HC25045-S	HC25050-S	HC25070-S	S	300 kg
HC25045-M	HC25050-M	HC25070-M	M	300 kg
HC25045-L	HC25050-L	HC25070-L	L	300 kg
HC25045-XL	HC25050-XL	HC25070-XL	XL	300 kg

Comfort-liina

Olkapäämalli ilman jaettuja jalkaosia

Saatavana myös pidempänä mallina tukemaan päätä.

- Ei vahvikkeita, kahvoja tai pehmusteita
- Sopii potilaille, joilla on kipuja
- Mukautuu helposti potilaan vartaloon



Soft Air Mesh



Comfort-liina on pehmeä nostinliina ilman vahvikkeita kahvoja tai pehmusteita. Liina mukautuu helposti potilaan vartaloon. Pehmeä liina on suunniteltu antamaan potilaalle mukavuutta ja turvallisuuden tunnetta. Istumisliina ilman jaettuja jalkaosia, joka jakaa kehon painon tasaisesti paineen vähentämiseksi.

Comfort-liina Soft Air Mesh-kankaasta mahdollistaa sen, että sen voi jättää hetkeksi potilaan alle tuoliin tai pyörätuoliin noston jälkeen. Liina kiinnitetään potilaan ollessa makuulla.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
HC25060-JM	Junior M	300 kg
HC25060-S	S	300 kg
HC25060-M	M	300 kg
HC25060-L	L	300kg
HC25060-XL	XL	300 kg

Kokovartaloliina

Korkea selkämalli, jaetut jalkaosat

Saatavana myös matalana mallina ilman päätukea sekä verkkokankaaisena.

- Tukee päätä
- Sopii potilaille, joiden keskivartalo on heikko
- Kalteva istuin-asento



Polyesteri



Kokovartaloliina on mukava nostinliina ilman vahvikkeita, kahvoja tai pehmusteita takana. Se tarjoaa hyvän tuen koko selälle ja tukee päätä.

Kokovartaloliinaa voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja se sopii useimmille potilaille. Vahvistettu pääntuki tekee siitä sopivan nostinliinan esim. potilaiden nostamiseen tasaisilta pinnoilta, kuten lattioiden. Kokovartaloliina on valmistettu matalan kitkan polyesterikankaasta, mikä tekee liinan käytöstä nopeaa ja yksinkertaista.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
HC25010-S	S	300 kg
HC25010-M	M	300 kg
HC25010-L	L	300 kg
HC25010-XL	XL	300 kg
HC25010-XXL	XXL	300 kg
HC25010-XXXL	XXXL	300 kg

Kokovartaloliina

Korkea malli, jaetut jalkaosat

- Ei vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita
- Sopii henkilöille, joiden keskivartalo on heikko
- Tuettu istuma-asento

Polyester



Polyesteri-verkko



Kokovartaloliina tuntuu mukavalta ilman vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita takana ja tarjoaa hyvän tuen koko vartalolle. Liinaa voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja se sopii useimmille henkilöille.


Kokovartaloliinaa voidaan käyttää pesu- ja kylpytilanteissa, ja se voidaan myös jättää potilaan taakse lyhyeksi ajaksi siirron päätyttyä.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
25005-JM	Junior M	300 kg
25005-S	S	300 kg
25005-M	M	300 kg
25005-L	L	300 kg
25005-XL	XL	300 kg

Kokovartaloliina, siluettiliina

Korkea selkämalli, jossa on jaetut jalkaosat

- Ei vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita
- Sopii henkilöille, joiden vartalon hallinta on heikkoa
- Sopii hyvin lapsille

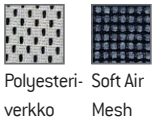

Polyesteri-verkko Soft Air Mesh



Kokovartaloliina on mukava ilman vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita. Se mukautuu henkilön koko vartaloon tarjoten hyvää tukea. Sitä voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja sen kapea muotoilu tekee siitä optimaalisen valinnan pienemmille henkilöille.

Kokovartaloliinaa on saatavana kahdessa kankaassa, jotka voidaan jättää potilaan taakse lyhyeksi ajaksi.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
25015-JS	Junior S	300 kg
25015-JM	Junior M	300 kg
25015-S	S	300 kg
25015-M	M	300 kg
25015-L	L	300 kg
25015-XL	XL	300 kg

Kylvetysliina

Olkapäämalli, jaetut jalkaosat

- Vahvistetut selkä- ja jalkatuet
- Sopii potilaille, joiden keskivartalo on heikko
- Vahvistettu selkä antaa ylimääräistä tukea



Polyesteri-verkko



Olkapäihin asti korkea kylvetysliina, jossa on jaetut jalkaosat ja vahvistetut selkä- ja jalkatuet. Se on suunniteltu tukemaan potilaan selkää, mikä tekee siitä hyvän ratkaisun potilaille, joiden keskivartalon kannatuskyky on heikko.

Kylvetysliina sopii useimmille potilaille ja sopii parhaiten pesutilanteisiin. Kylvetysliina on valmistettu nopeasti kuivuvasta on valmistettu polyesteriverkosta, joka kuivuu nopeasti kylpemisen tai suihkun jälkeen. Selkätuki voidaan poistaa tarvittaessa. Kylvetysliina on saatavana myös polyesteristä valmistettuna.

Tuotenumero	Koko	A (mm/ inch)	B (mm/ inch)	C (mm/ inch)	Nostokapasiteetti
HC25035-JS	Junior S	90/3.5	540/21.2	520/20.4	300 kg
HC25035-JM	Junior M	150/5.9	600/23.6	580/22.8	300 kg
HC25035-S	S	300/11.8	900/35.4	630/24.8	300 kg
HC25035-M	M	360/14.2	900/35.4	630/24.8	300 kg
HC25035-L	L	420/16.5	1000/39.4	630/24.8	300 kg
HC25035-XL	XL	470/18.5	1070/42.1	630/24.8	300 kg

WC-liina

Matala malli, jaetut jalkaosat

Saatavana myös korkeampana mallina.

- Vahvistettu selkätuki
- Sopii potilaille, joilla on hyvä keskivartalon ja niskan kannatus
- Pehmeuste käsivarren alla lisää mukavuutta



Polyester



Polyesteri-
verkko



WC-liina on matala malli jaetuilla jalkaosilla. Siinä on vahvistettu selkätuki, joka antaa hyvän selkätuen ja pehmuste käsivarsien alla lisää mukavuutta. Jalkaosien leveä väli tekee liinan käytöstä nopeaa ja yksinkertaista ja se mahdollistaa pukeutumisen ja riisumisen WC-käynnin tai pesemisen aikana.

WC-liinan pystyasento tekee siirtymisestä helppoa ja sopii potilaille joilla on hyvä keskivartalon ja niskan kannatus. Potilaille, joilla on heikko vartalon hallinta, suositellaan lisänä vartalovyötä.

Tuotenumero (polyesteri)	Tuotenumero (verkko)	Koko	Nostokapasiteetti
HC25080-JS	-	Junior S	300 kg
HC25080-JM	HC25085-JM	Junior M	300 kg
HC25080-S	HC25085-S	S	300 kg
HC25080-M	HC25085-M	M	300 kg
HC25080-L	HC25085-L	L	300 kg
HC25080-XL	HC25085-XL	XL	300 kg

WC-liina

Korkea malli, jaetut jalkaosat

- Vahvistettu selkäosa
- Sopii henkilöille, joiden vartalon hallinta heikkoa
- Pysty istuma-asento
- Lapsille sopiva malli



Polyesteri-
verkko



WC-liinassa on korkea vahvistettu selkätuki, joka antaa selälle lisää tukea ja pehmusteet käsivarsien alla lisämukavuutta. Nostinliinassa on myös pehmustettu ja säädettävä niskatuki, joka antaa lisävakautta pään hallintaan. Jalkaosien leveä väliosa tekee WC-liinasta nopean ja yksinkertaisen käyttää ja mahdollistaa pukeutumisen ja riisuutumisen wc-käynnin tai kylpemisen aikana.


Pystyasento helpottaa siirtymistä WC:hen ja takaisin ja sopii henkilöille, jotka tarvitsevat erityistukea vartalon ja pään hallinnassa. Potilaille, joiden vartalonhallinta on heikkoa, suositellaan lisäksi tukivyötä. WC-liina on saatavilla nopeasti kuivuvana verkkokankaana.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
25090-JM	Junior M	300 kg
25090-S	S	300 kg
25090-M	M	300 kg
25090-L	L	300 kg
25090-XL	XL	300 kg

Istumaliina

Ylimääräistä selkätukea

- Olkapäille ulottuva malli, jossa on jaetut jalkaosat
- Vahvistettu selkä- ja jalkaosat
- Sopii henkilöille, joiden keskivartalo on heikko
- Pystyasento

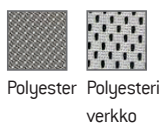

Istumaliina on suunniteltu antamaan henkilölle ylimääräistä selkätukea, ja sitä voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja se sopii useimmille henkilöille.

Vahvistettu selkäosa ja polyester kankaan kitkatomuus tekee nostotilanteista nopeita ja yksinkertaisia.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
25030-JS	Junior S	300 kg
25030-JM	Junior M	300 kg
25030-S	S	300 kg
25030-M	M	300 kg
25030-L	L	300 kg
25030-XL	XL	300 kg

Monikäyttöliina

Kävelyn harjoitteluun ja kuntoutukseen

- Täydellinen liina kävelyharjoitteluun ja kuntoutukseen
- Sopii potilaille, joilla on jonkin verran kehon hallintaa
- Voidaan käyttää pukeutumisen ja riisumisen aikana



Monikäyttöliina on monipuolinen liina erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yhdessä laajan lisävarustevalikoiman kanssa liina tukee seisomista ja kävelyä tasapainoharjoitteissa, WC-käynneillä sekä pukeutumisen ja riisumisen yhteydessä.

Monikäyttöliina sopii potilaille joilla on jossain määrin kehon hallintaa. Lisätukea varten hihnaa voidaan käyttää lantiovyön kanssa (kuvassa).

Koko	Tuotenumero	Nostokapasiteetti
S	HC25105-S	200 kg
M	HC25105-M	200 kg
L	HC25105-L	200 kg
XL	HC25105-XL	200 kg

Potilasnostimet keventävät fyysistä rasitusta

Potilassiirrot ovat hoitotyön fyysisesti raskaimpia työtehtäviä. Fyysistä kuormitusta saadaan vähennettyä käyttämällä potilasnostimia. Samalla nostettavan kokemus turvallisuudesta ja yksityisyydestä kasvaa

Tehokasta nostamista

Kolmasosa kaikista terveydenhuollon ammattivammoista johtuu nostamisesta. Seitsemän kymmenestä hoitajasta pitää työtään raskaana. Potilasnostimien käyttö vähentää sairauspäiviä ja nostamiseen tarvittavan henkilöstön määrää.


Korpisen valikoimissa olevat Human Caren nostoratkaisut ovat luotettavia ja innovatiivisia. Human Caren missio on parantaa hoidon laatua ja liikkumisvapautta niille, joilla on erityistarpeita. Korkealaatuiset tuotteet ovat helppoja asentaa ja vaativat vähän huoltoa.

Ylänostin on paras mahdollinen apuväline potilaan siirtämiseen hoivaympäristössä. Kattoon kiinnitetyn nostimen ansiosta lattiatilaa erilliselle nostimelle ei tarvita. Siten hoitajat voivat liikkua nopeammin, vapaammin ja turvallisemmin.

Human Care tarjoaa täydellisen valikoiman sekä ylänostimia että siirrettäviä järjestelmiä. Nostinjärjestelmät täydentää monipuolinen valikoima kattokiskoratkaisuja, nostoliinoja ja lisävarusteita. Kattokiskoratkaisuissa on rajattomia asennusmahdollisuuksia niin potilas- ja kylpyhuoneeseen kuin yleisiin tiloihinkin, sairaalaan, hoivakotiin tai koti-

tiloihin. Human Caren nostojärjestelmät sopivat jopa uimahalleihin. Kevyet kattokiskot voidaan asentaa rakentamisen yhteydessä, mutta helposti lisätä myös jo olemassa oleviin tiloihin. Kattokiskojärjestelmät sivulla 5.

Kaikki Human Caren tuotteet täyttävät Medical Device Regulation (EU) MDR 2017/745

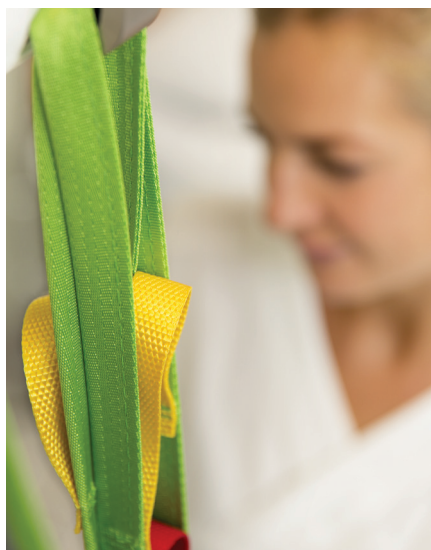

Roomer S – huoneesta toiseen

Huoneesta toiseen huoneeseen siirtyminen

Roomer S on ylänostin, joka tarjoaa mahdollisuuden siirtää potilas huoneesta toiseen tekemättä muutoksia oviaukkoihin. Se sopii myös tiloihin, joissa on liukuovet tai palo-ovet. Sen siirrettävyyden ansiosta samaa laitetta voidaan helposti käyttää useissa huoneissa, mikä vähentää huomattavasti kustannuksia. Nostimen kantokapasiteetti on 220 kg, ja siihen voidaan valita 45 tai 55 cm leveä, kevyt nostotanko joko 2, 3 tai 4 pisteen ripustuksella.

Turvallinen kokemus kaikille

Roomer S:n mahdollistama huoneidenvälinen toiminto vähentää nostojen määrää ja minimoi sekä potilaan että hoitajan rasitusta. Roomer S tekee nostosta mukavan kokemuksen, kun käynnistys ja pysähdys ovat pehmeitä ja nousu tapahtuu vakionopeudella potilaan painosta tai liikkeen suunnasta riippumatta. Akun lataus voidaan tehdä kätevästi käsiohjaimen avulla.



Tiedon tallennus

Roomer S:ssä on mahdollisuus tallentaa käyttö- ja suorituskäyryä koskevia tietoja. Nostimen käyttöön ja kuntoon liittyviä yksityiskohtaisia tietoja voidaan tarkastella suoraan sovelluksessa tai siirtää tietokoneelle lisäanalyysiä varten.



Human Care - Cosmos – kaksi käyttötapaa

Nykyaikainen muotoilu

Cosmos-kattonostimen suunnittelun keskiössä ovat innovaatio ja yksinkertaisuus. Sen moderni ja Reddot-palkittu skandinaavinen muotoilu sopii huomaamattomasti erilaisiin hoitoympäristöihin. Nostimen suurin etu on sen kaksoistoiminnallisuus: sitä voi käyttää joko kiinteästi asennettuna tai helposti siirrettävänä nostimena. Vain 6 kg painava nostin on helppo siirtää huone-esta toiseen integroidun kantokahvan avulla. Nostimes-ta on saatavilla kolme mallia eri nostokapasiteeteilla: 150 kg, 220 kg ja 272 kg.

Cosmos - Ylivoimainen akun kesto

Cosmos nostimen sisällä oleva tehokas litium-akku ladataan käsiohjaimen kautta tai valinnaisella kiskoon integroidulla latauksella, joka lataa nostinta automaattisesti. Nostokapasiteetti on jopa yli 200 ylös ja alas -nostoa yhdellä latauksella.



Tutustu kaikkiin malleihin
www.korpinen.com



Yli 200
ylös ja alas -nostoa
yhdellä
latauksella!



reddot winner 2024

KORPINEN

– A PART OF AddLife