





Tärkeää! Tämä pikaopas ei korvaa käyttöohjetta, joka on ladattavissa osoitteessa www.korpinen.com tai www.humancaregroup.com. Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä!

Komponentit

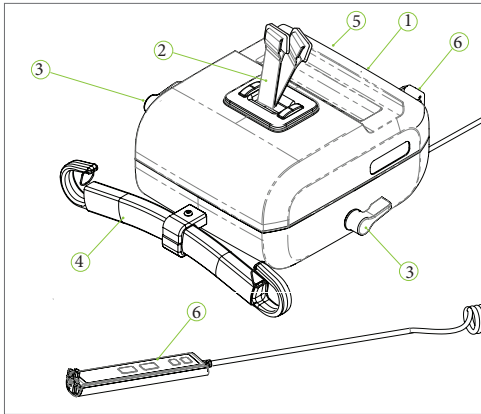

- 1 Nostimen ohjainpaneeli
2 Nostohihnat
3 Suuntavivut
4 Nostotanko
5 Häätäpysäytys
6 Kaukosäädin

Nostimen ohjainpaneelin toiminnot

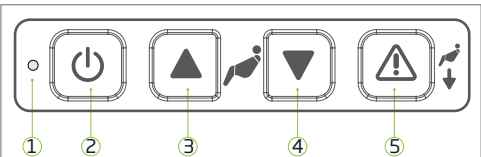

- 1 Tilan merkkivalo
2 Virta päälle/pois
3 Ylös-painike
4 Alas-painike
5 Häätälasku


Tilan merkkivalot

- Vilkkuu vihreänä
Päällä/käyttövalmis
Akku täynnä
- Palaa punaisena
Varmistin kytketty
Vianetsintä käynnissä!
- Vilkkuu keltaisena
Päällä/käyttövalmis
Akun varaustaso normaali
- Palaa keltaisena
Nostinta ladataan
Toiminnot estetty
- Vilkkuu punaisena
Päällä/käyttövalmis
Akun varaus alhainen
Akun latausvaroitus
- Vilkkuu vihreänä/
keltaisena
Huoltovaroitus
Tee tarkastus
- Palaa vihreänä
Nostin käytössä
- Vilkkuu punaisena/
keltaisena
Huolto ohitettu
Akun varaus alhainen




Tärkeää! Ylänostin on suunniteltu ja testattu sisäkäyttöä varten yhden potilaan nostamiseen kerrallaan. Tuotetta ei saa upottaa veteen.
Lue kaikki ohjeet, jotta saat kaikki tuotetiedot!

Kaukosäätimen toiminnot

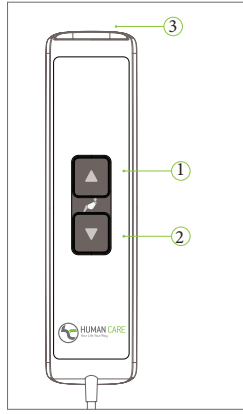

- 1 Ylös-painike
2 Alas-painike
3 USB-C- ja latausportti

Nostimen lataaminen

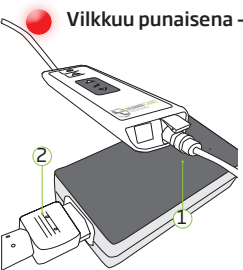

Vilkkuu punaisena - lataa nostin välittömästi!

- 1 Liitä latauspistoke kaukosäätimeen.
2 Liitä pistoke laturiin ja kytke pistoke seinäpistorasiaan. Laturin saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
⚠ Huomautus: Jos häätäpysäytys aktivoidaan, nostin ei lataudu!




Tärkeää! Nostinta voidaan käyttää vain Human Care -laturin kanssa, ja laturi on irrotettava ennen kuin nostinta voidaan käyttää.

Mallit: 55300H
Kaikki oikeudet pidätetään.




Huoneesta toiseen -siirto

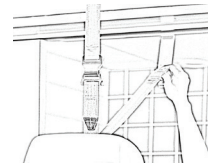

Aktivoi haluamasi hihna kääntämällä suuntavipua. Jos vipu osoittaa kohti jalkakoukkuja, jalkakoukkuja lähinnä oleva hihna on aktiivinen. Jos se osoittaa kohti nostohenkaria, nostotankoa lähinnä oleva hihna on aktiivinen.

⚠ Tärkeää! Älä käännä vipua, ellei molempia hihnoja ole kytketty vastaaviin liukuvaunuihin. **Vivun on aina osoitettava kytkettyä hihnaa kohti.**

Nostimen käyttäminen

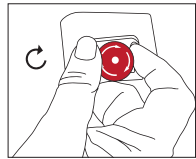


Häätäpysäytys päälle
Aktivoi painamalla punaista painiketta.

Häätäpysäytys pois päältä
Käännä punaista painiketta myötäpäivään.




⚠ Tärkeää! Hätälaskua on käytettävä vain hätätilanteissa. Toiminnassa on n. 4 sekunnin viive.

Aktivoi painamalla Alas-painiketta (4) ja nostimen ohjainpaneelin hätälaskupainiketta (5) samaan aikaan.

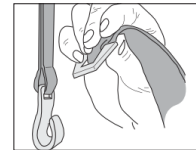


Nostimen ripustaminen
Aseta nostin sopivalle alustalle ja vedä hihnaa varovasti ulospäin painamalla samaan aikaan Alas-painiketta joko käsiohjaimesta tai nostimen ohjainpaneelistä. Kytke nostohihna jatkohihnaan niin, että se pysyy tiukasti paikoillaan (helpointa on kytkeä se yläpuolelta viistossa kulmassa kuvan mukaisesti). Varmista ennen käyttöä, että nostohihna on tiukasti paikoillaan.

Nostoliinat
Kiinnitä ensin pään puoleisen osan nostoliinan lenkit nostotankoon ja sitten jalkalenkit jalkakoukkuun. Varmista, että lenkit on kiinnitetty varmistussokan alapuolelle.

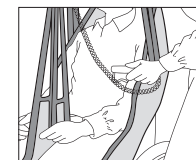

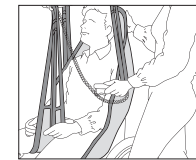

Oikeat nostotekniikat
Älä käytä nostotankoa potilaan ja nostimen siirtämiseen. Älä pidä kiinni koukuista nostamisen aikana. Kun potilas on kiinnitetty mukavasti nostoliinaan, nosta nostin, pidä kiinni nostoliinasta ja aseta potilas oikeaan kohtaan sekä siirrä potilasta.





Oikeat nostotekniikat
Älä käytä nostotankoa potilaan ja nostimen siirtämiseen. Älä pidä kiinni koukuista nostamisen aikana. Kun potilas on kiinnitetty mukavasti nostoliinaan, nosta nostin, pidä kiinni nostoliinasta ja aseta potilas oikeaan kohtaan sekä siirrä potilasta.


Yleinen hoito


 Lataa nostin joka ilta.

 Pyyhi kevyesti kostutetulla kuivausliinalla.

 Desinfioi DuPont™ Virkon® tai vastaavalla aineella.

 Älä koskaan puhdista nostinta voimakkailla puhdistusaineilla.

 X Älä pudota veteen

 Aktivoi häätäpysäytin, kun laite ei ole käytössä. Huom! Nostin ei lataudu häätäpysäytyksen ollessa aktiivinen.

⚠ Tärkeää! Käytä kuljettamiseen vain hyväksytyjä kuljetustapoja! Nostin on aina varastoitava ja sitä on kuljetettava vaakatasossa. Aseta kärryyn siirtämistä varten tai käytä hyväksytyjä kantohihnoja¹. **Varoitus!** Hihnaa käytettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei nostohihnaa kierretä tai taivuteta.

Tarkastus

Vuosittaiset tarkastukset - Human Caren sertifioiman pätevän tekniikon on tarkastettava nostin vähintään kerran vuodessa. Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä nostimen hihna on vaihdettava vähintään joka toinen vuosi. **Kuukausittaiset tarkastukset** - tarkista nostimen hihnat vaurioiden tai kulumisen varalta. Varmista asianmukainen toiminta syöttämällä koko pituus. **Päivittävät tarkastukset** - tarkasta aina ennen käyttöä, ettei nostimessa ole näkyviä merkkejä vaurioista. Varmista, että nostin on asennettu oikein jatkohihnaan tai liukuvaunuun. Tarkista aina ennen käyttöä, ettei nostoliinoissa ja hihnoissa ole merkkejä kulumisesta. Tuotetta ei saa käyttää, jos se on selvästi kulunut.

Vianetsintä

● **Jos merkkivalo ei pala, tarkista seuraavat seikat:**
- Päivirrankatkaisin on päällä
- Akut on ladattu täyteen - lataa tai vaihda
- Häätäpysäytyspainiketta ei ole painettu (laita pois päältä kääntämällä vastapäivään)

● ● ● **Jos merkkivalo vilkkuu, tarkista seuraavat seikat:**
- Kaukosäätimen painike ei toimi ylös- tai alaspäin painettaessa (vaihda tarvittaessa)
- Ylöspäin painettaessa nostin ei ole jo yläasennossa (laske Alas-painikkeella)
- Alaspäin painettaessa nostin ei ole jo alasennossa (nosta Ylös-painikkeella)

● **Jos merkkivalo palaa punaisena:**
- Nostimen moottori on ylikuumentunut - anna jäähtyä
- Nostin on ylikuormittunut - laske se alas käyttämällä hätälaskupainiketta

● **Jos merkkivalo palaa keltaisena:**
- Lataus käynnissä

● ● ● **Jos nostohihna ei liiku ulos kunnolla:**
- Vedä hihnaa ylöspäin samalla, kun painat kaukosäätimen tai ohjainpaneelin alas-painiketta

● ● ● **Jos merkkivalo alkaa vilkkua punaisena:**
- Akut on ladattava; potilasta voidaan nostaa vielä muutamia kertoja



KORPINEN